

# コメット跳ね上げ取扱説明書

NB-540

販売店様へ 製品の施工は必ず、販売店、施工業者の方で行ってください、この取扱説明書はご使用になられるお客様へお渡しください。

本製品の取り付けには、ベストポジションバー・コメット等が必要です


## 各部の名称および素材

- ① NB 跳ね上げ回転部 (アルミダイキャスト) … 1 Set
- ② NB 跳ね上げ受け部 (アルミダイキャスト) … 1 Set
- ③ NB 跳ね上げ先端部 (アルミダイキャスト) … 1 Set
- ④ NB ブラケット (アルミダイキャスト) … 1 Set
- ⑤ 滑止 ブラケット用 (ウレタンゴム)
- ⑥ 各種ネジ・ボルト (ステンレス)
- ⑦ コーティングパイプ (ASA樹脂・アルミ) … 1本

エンドブラケット (NB-540) と跳ね上げジョイントをセットしてください。

一度、剥がした滑止は利用せずに付属の滑止に貼替えてください

NB跳ね上げ受け部  
M4丸皿ネジを止め  
Sワッシャ、低ナットを  
取り付け13mmBOXレンチ  
と6mm六角レンチで  
しっかり固定して  
ください

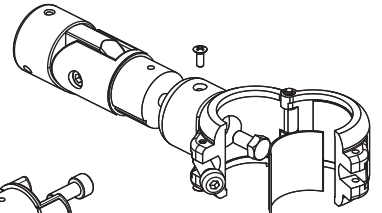

NB跳ね上げ回転部  
M4丸皿小ネジを止めます  
ボルトを13mmBOXレンチ  
でしっかり固定してください。

## 取り付け手順


- 1 NBを設置する
- 2 BPを仮固定する
- 3 跳ね上げセットを仮付けする
- 4 BPの幅を合わせて設置する
- 5 跳ね上げセットを平行に設置

**注** BP=ベストポジションバー  
NB=コメット

UB天井は補強バーの取り  
付けをしてください  
(NB付属)

BOXレンチ・六角レンチは本製品  
に含まれておりません

アルミコーティングパイプにあける下穴はφ3.4mm  
のキリを使用し、M4タップ加工をして小ネジで止め  
るか、ドリルビスで固定してください

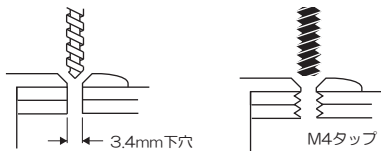

## 取り付け後の確認事項


- NB・BPの強度が保たれている
- BP本体が垂直に立っている
- 手すりが水平になっている
- 先端金具にゆがみがない

手すり最長寸法1200mm


最長寸法より長い手すりの  
取り付けは危険ですので  
おやめください。

ガラス戸  
注意

ベストポジションバーは  
浴室には設置しないで  
ください

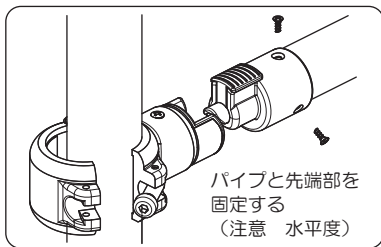


パイプと先端部を  
固定する  
(注意 水平度)

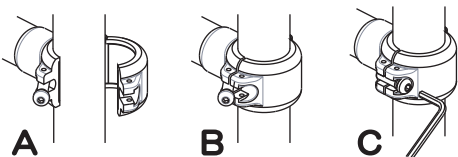

- A 取り付け位置を決めブラケットをボールに合せます。
- B 方向を合せフックをひっかけ仮止めを行います。
- C 六角レンチで固定用ボルトをしっかりと締めます。

❗ 付着した水分はよく  
拭き取ってください

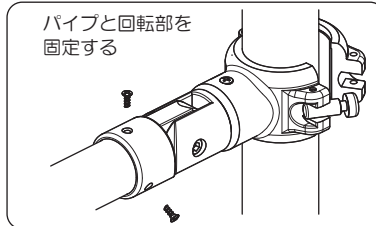

パイプと回転部を  
固定する

❗ コメット・ベストポジションバーの  
取り付けは、それぞれ施工説明書に  
従って作業してください