




Our BestPositionBar Continue Evolving

木・伸縮手すり

施工説明書

木手すり

実寸：φ35×515(600)・815(900)・1115(1200)

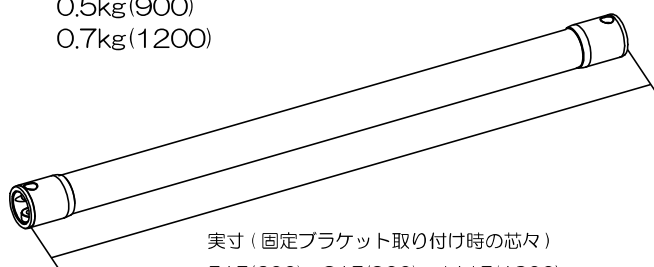重量：0.3kg(600)
0.5kg(900)
0.7kg(1200)実寸（固定ブラケット取り付け時の芯々）
515(600)・815(900)・1115(1200)キャップボルト
M6×12 4本付属

手すり部	木
接続部	PP/ エラストマー / 真鍮

伸縮手すり

実寸：φ34・φ40×515～815(600～900)

φ34・φ40×815～1115(900～1200)

φ34・φ40×1115～1415(1200～1500)

重量：0.76kg(600～900)
1.11kg(900～1200)
1.45kg(1200～1500)実寸（固定ブラケット取り付け時の芯々）
515～815(600～900)
815～1115(900～1200)
1115～1415(1200～1500)キャップボルト
M6×12 4本付属

パイプ	アルミ / ASA / AES / PA
機構	PP / PA / スチール / アルミ
ネジ類	スチール / SUS

施工業者の方へ

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。
ベストポジ BPZ の施工説明書と合わせてよくお読みになり、設置手順
通りに正しく設置してください。設置後、ご利用者に取扱説明書と
合わせて、よく説明してください。

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。



禁止

- 自力で危険な状態から回避することができない方、使用・操作方法が理解できない方は使用しないでください。
- ご利用者による設置や取り外し及び伸縮の固定解除は行わないでください。
- 補助手すり以外の用途では使用しないでください。




必ず実行



- 必ず、ベストポジ BPZ の取扱説明書をよくお読みになりご理解いただいたうえで使用してください。
- 身体状況によりご自分の身体を安定させられない方は、必ず介助者が付き添って使用してください。

手順 1 木手すり組立手順（固定・曲げ）

基本ブラケットの内側からM6キャップボルトで固定します。

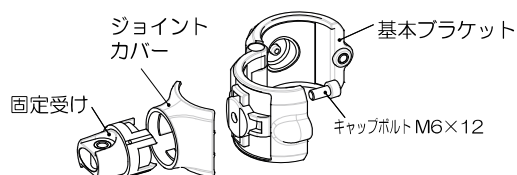


システムエンド（直）

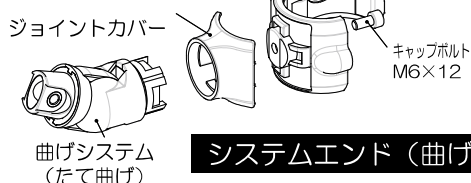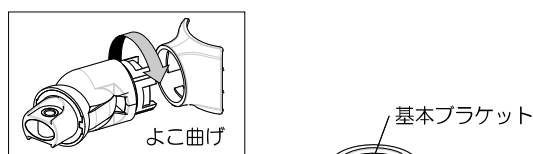


システムエンド（曲げ）

固定ブラケットの方向を合わせ手すりに差し込みM6キャップボルトで固定してください。

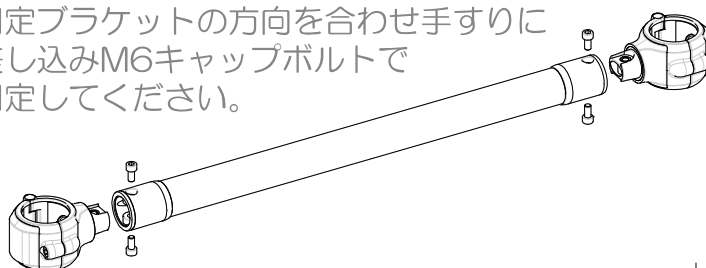

システム木手すり固定セット


システム木手すり曲げセット

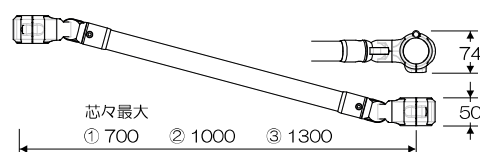

注意


ブラケット組み方注意

ボルト穴の位置を確認し、両側を真っすぐに仮止めた上で、ゆっくりと交互に締めてください。

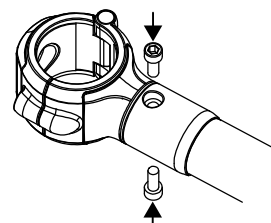


手順 2 木手すり取り付け手順（固定・連結）



- 1 基本になる本体を設置手順に従い設置する。
- 2 手すりの高さを決め木手すりブラケットを取付け軽くとめる。
- 3 2本目の本体を支えながら本体を木手すりブラケットに当て軽くとめる。
- 4 2本目の本体を設置手順に従い設置する。
- 5 木手すりブラケットを水平に固定する。

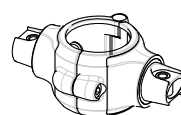

接続ブラケット

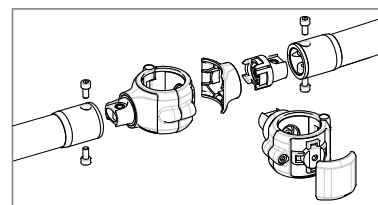


3本以上の連結設置を行う場合、接続ブラケットをご利用いただくか、お手持ちのブラケット組み替えにより、木手すりを連続し設置してください。

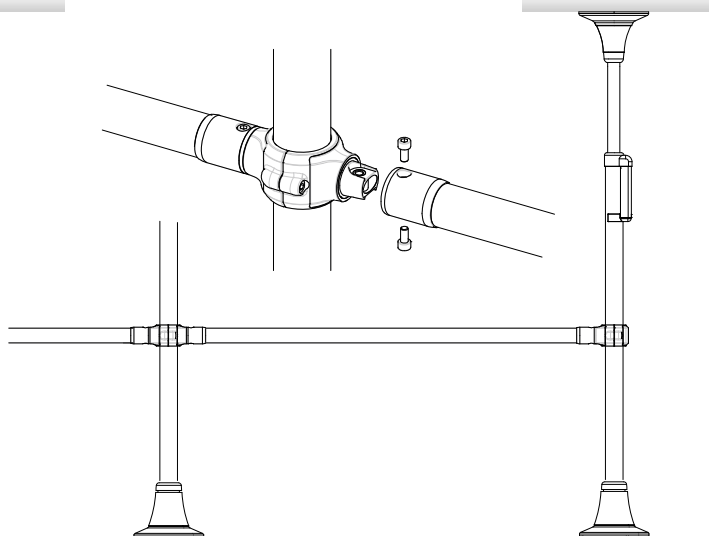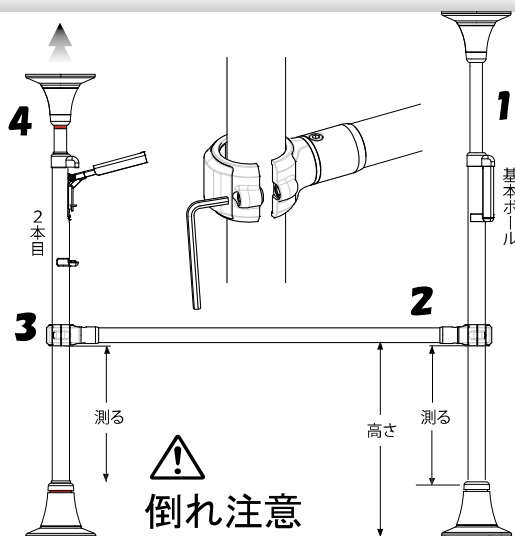


手順 1 木手すり組立手順（跳ね上げ・取り外し）

基本ブラケットの内側からM6
キャップボルトで固定します。

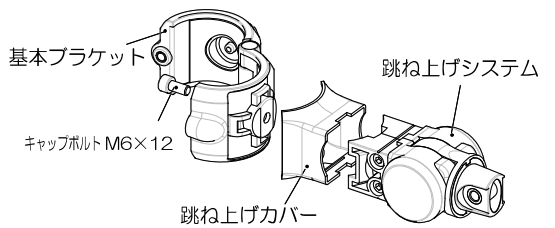

システム跳ね上げ回転部

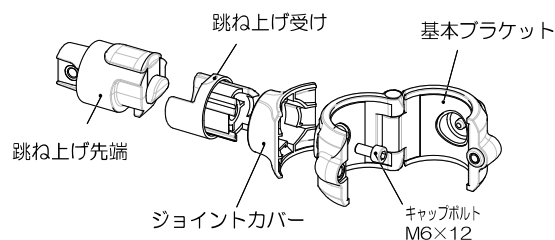

システム跳ね上げ先端部


跳ね上げ先端部、跳ね上げ回転部の
方向を合わせ手すりに差し込み
M6キャップボルトで
固定してください。




必ず実行

木手すりを取付けてか
ら下げてください。

システム木手すり
跳ね上げセット

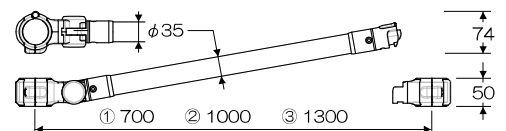


システム木手すり
取り外しセット

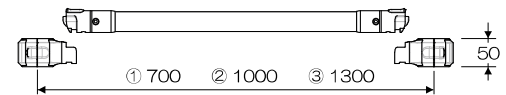

手順 2 木手すり取り付け手順（跳ね上げ）

- 1 基本になる本体を設置手順に従い設置する。
- 2 手すりの高さを決め跳ね上げ回転部を手すりを上げた状態で取り付ける。

※ ベース上部からの
高さを測る

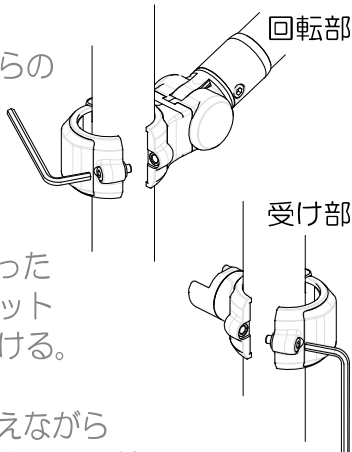



- 3 2本目の本体へ測った
高さに受けブラケット
を合わせ、取り付ける。

- 4 2本目の本体を支えながら
バーをさげ先端部を受けに差し込み、
設置幅を調整する。

⚠ 倒れ注意


- 5 2本目の本体を設置手順に従い設置する。

- 6 開閉状態を確認し、スムーズに作動するように
本体と跳ね上げブラケットを微調整する。

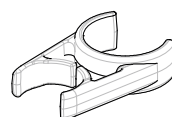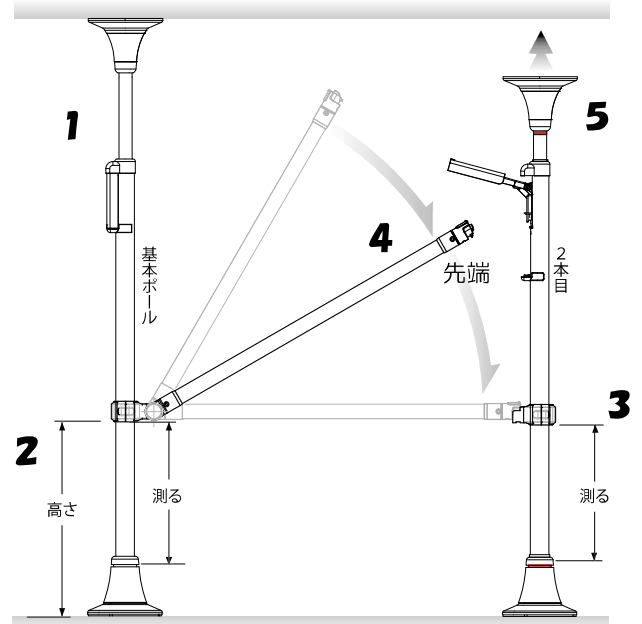

手すりホルダー

手すりホルダーをベース本体に取り
付けることで手すりを跳ね上げたとき
に手すりを保持することができます。

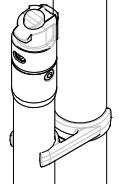


警告

木手すり取付け最長寸法
システム木手すり1200用




手順 1 伸縮手すり組立手順（固定）


基本ブラケットの内側からM6
キャップボルトで固定します。

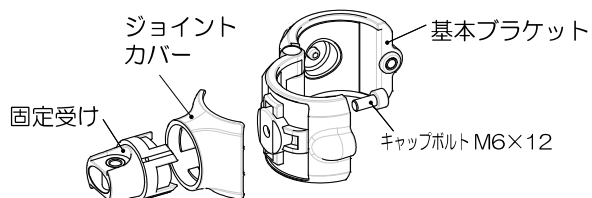


システムエンド（直）

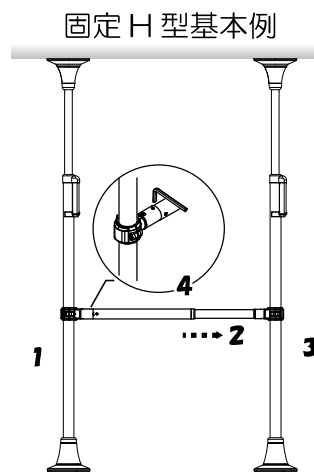


基本となるベスポジ本体を施工説明書の手順に従って 2 本ともに取付けてください。

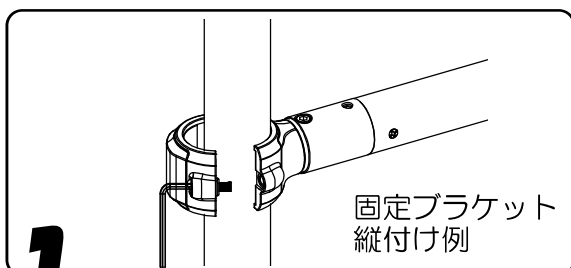


伸縮手すりの太い方のパイプ側を
ベスポジ本体に固定します。

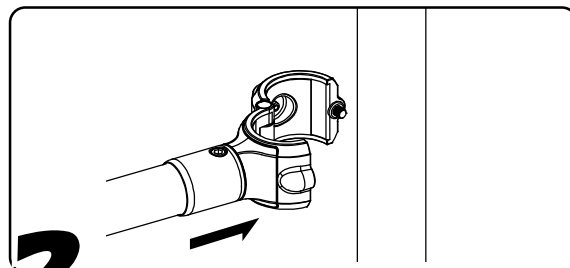

手すりを伸ばしもう一方のベスポジ
本体に連結させます。

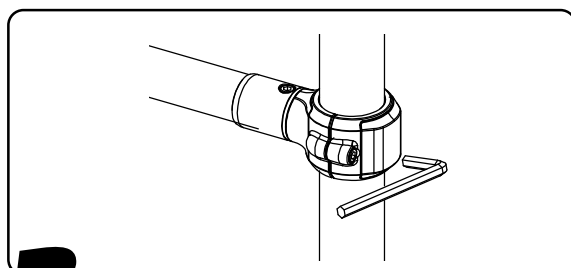


高さを合わせ、ブラケットをしっかり
レンチで固定してください。

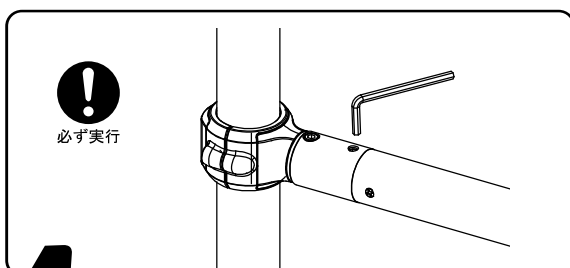

最後に手すりの伸縮を固定させるため
右回りにレンチで「カチッ」と音がす
るまで、締めてください。

伸縮固定方法



- ①伸縮を固定する際は右回りに「カチッ」と音が鳴るまで回して固定してください。
- ②解除する時は左回りに2回転程度回してください。
※回しすぎると故障の原因になります。

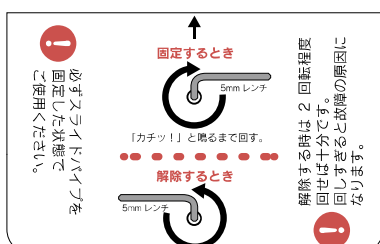





伸縮手すりのブラケットは固定
と曲げのみを使用してください。
跳ね上げと取り外しは使用でき
ません。

手順 1 伸縮手すり組立手順（曲げ）


基本ブラケットの内側からM6
キャップボルトで固定します。

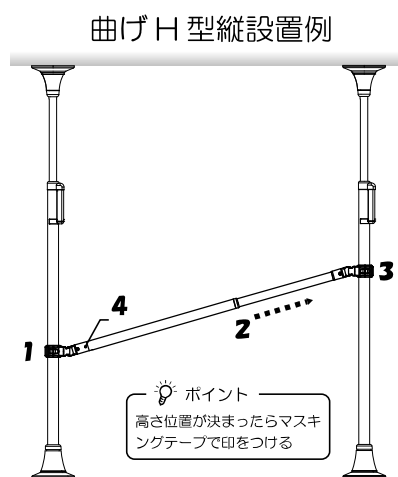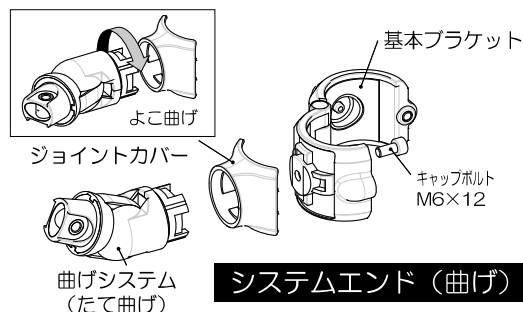


基本となるベスポジ本体を施工説明書の手順に従って2本ともに取付けてください。

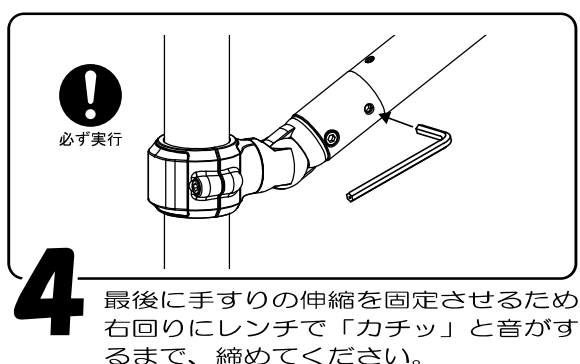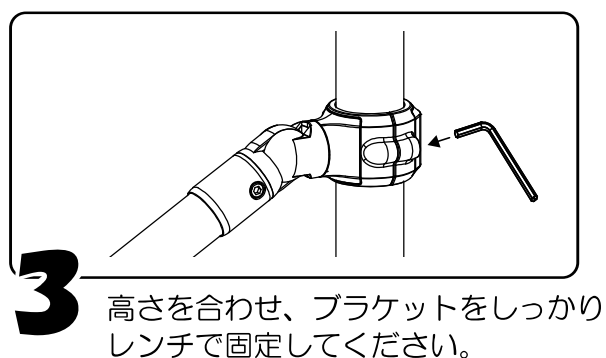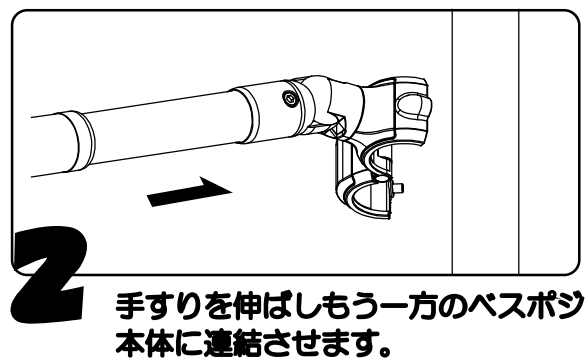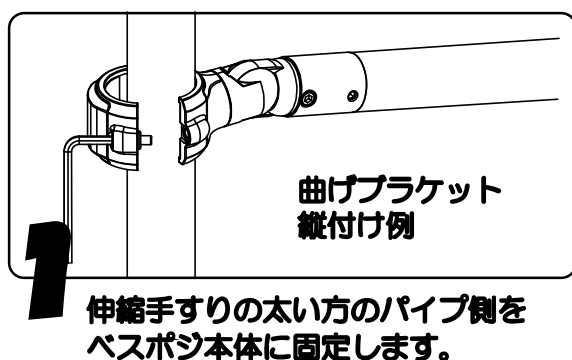

曲げ横オフセット組み換え例




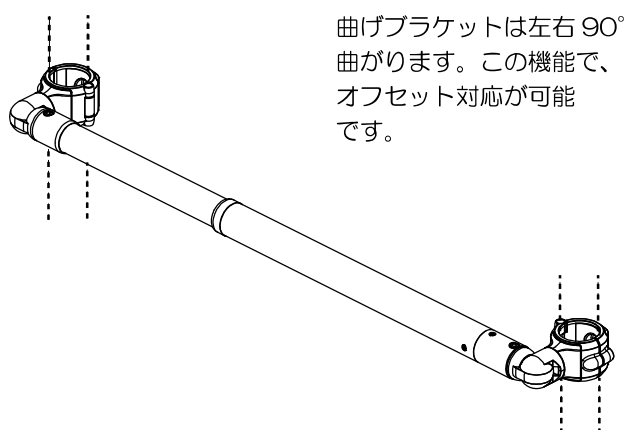


曲げ横三連結 90° 曲げ組み合わせ例

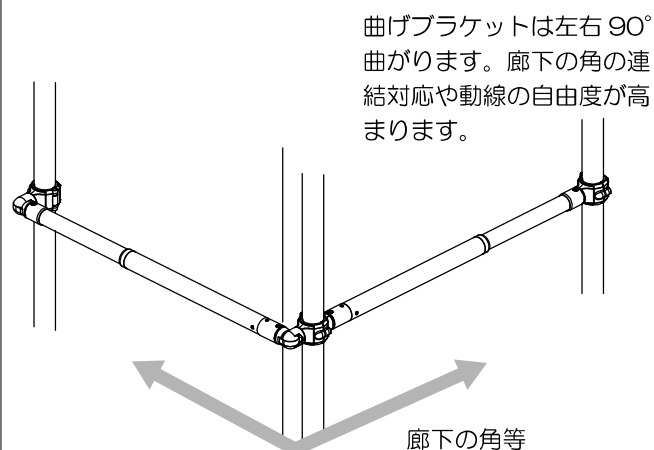


ブラケット説明・組み合わせ例

ブラケット組立・分解方法

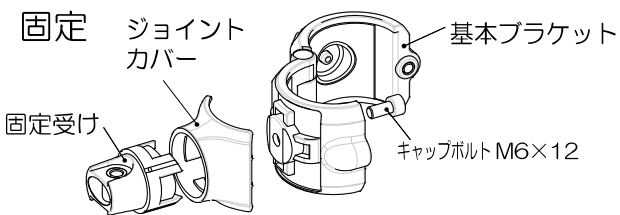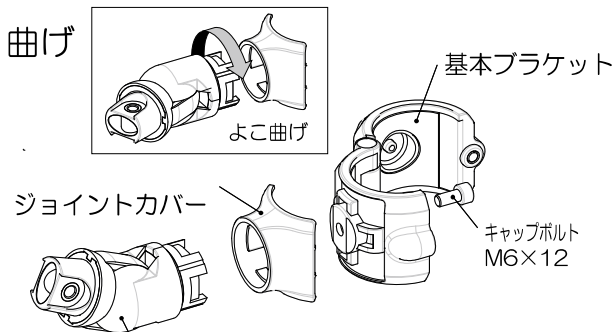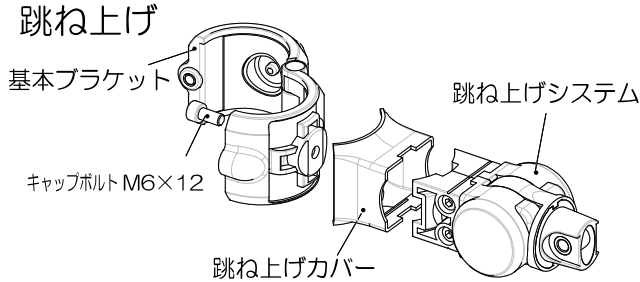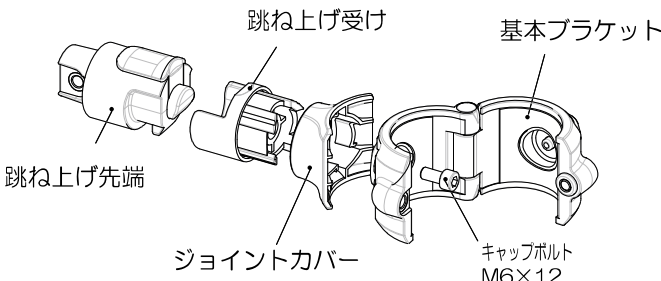固定  システムエンド（直） ※組むときは、固定受けのネジ穴が上下にくるように組んでください。	曲げ  システムエンド（曲げ）
跳ね上げ  システム跳ね上げ回転部 ※跳ね上げ部のヒンジは、手すりを取り付けることで、開け閉めができます。	取り外し  システム跳ね上げ先端部


連結ブラケット組立・分解方法（カバー取り外しと追加接続部）

①ブラケットカバーを外す

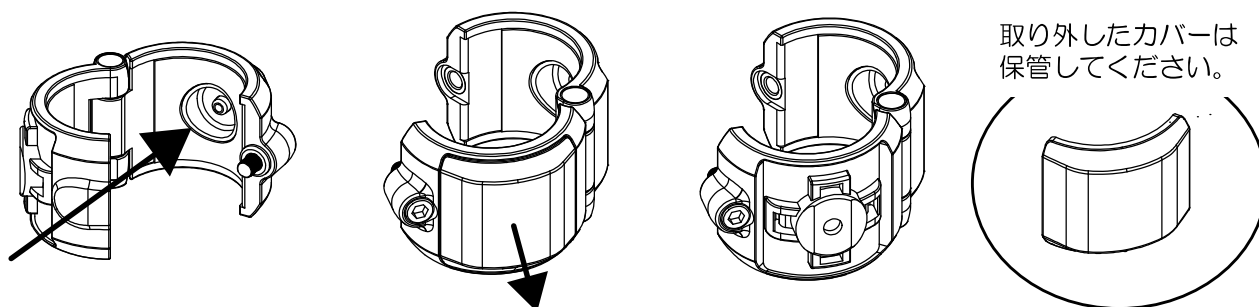


レンチなどで裏側の突起を押すとカバーが外れます。


②追加するブラケット部品を取り付ける

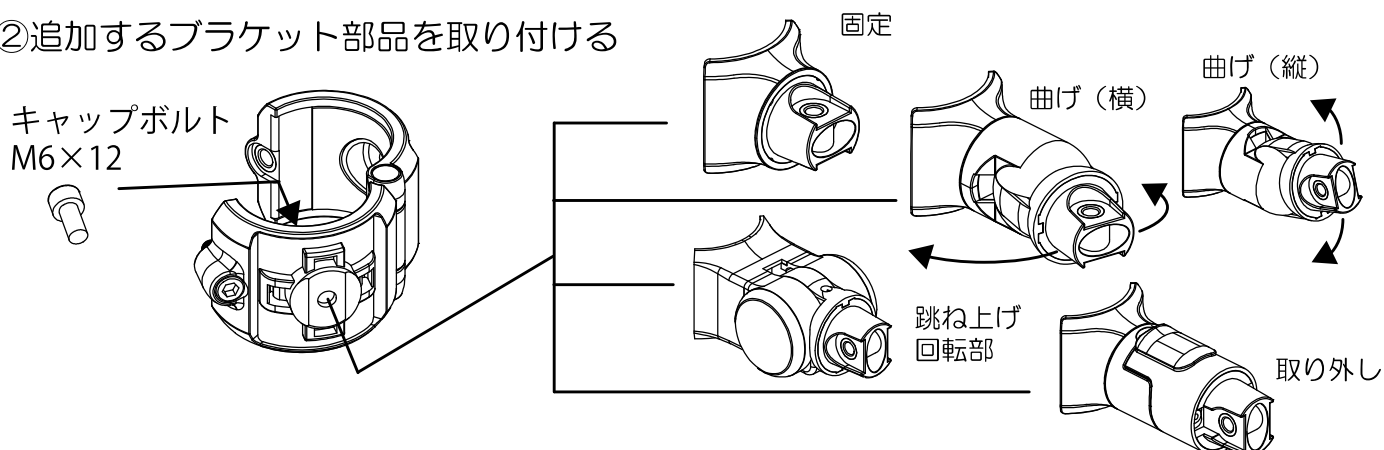

●固定 - 固定 3 連結例

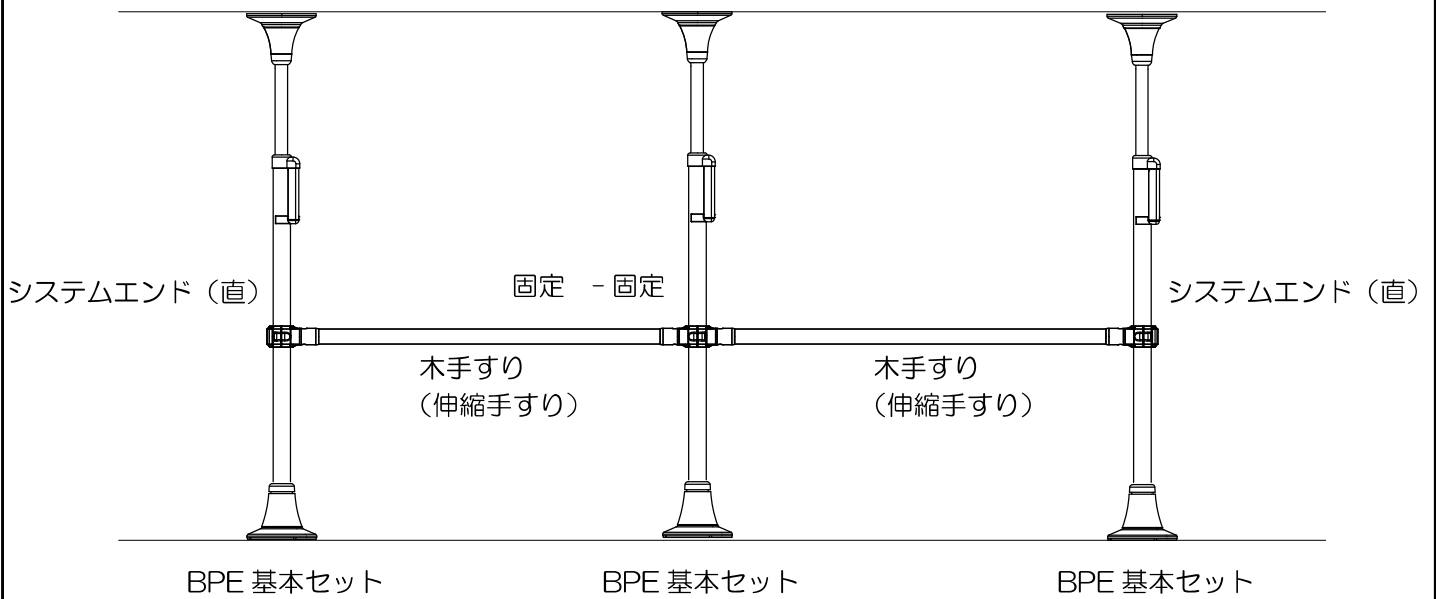


●固定 - 曲げ 3 連結例

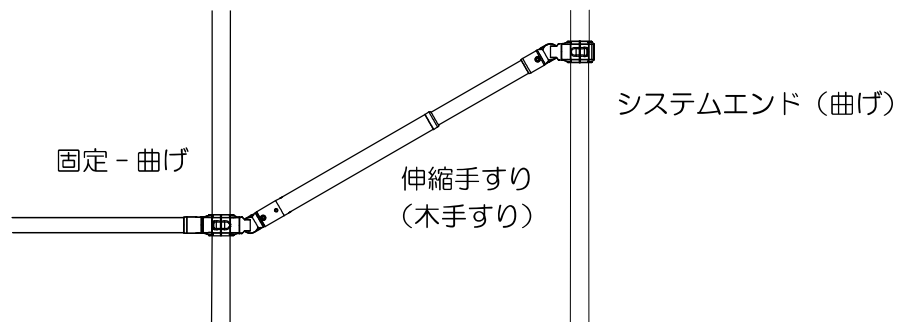


●固定 - 跳ね上げ 3 連結例

注意：跳ね上げには伸縮手すりは使用できません。

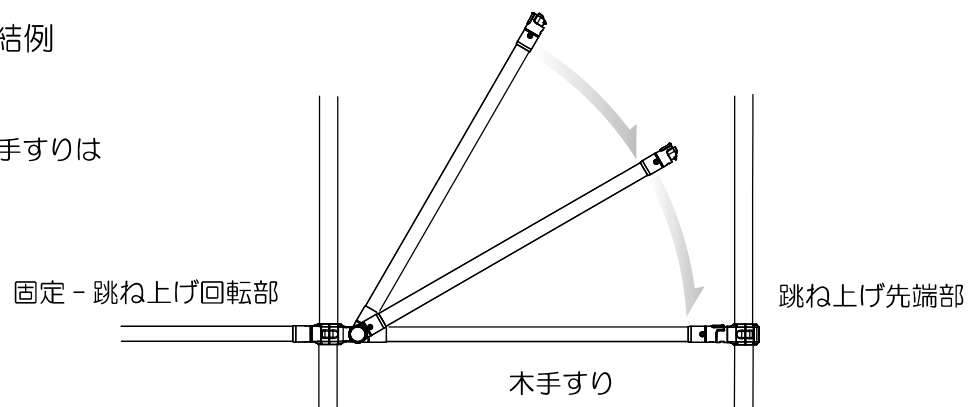


●固定 - 取り外し 3 連結例

固定 - 跳ね上げ先端部

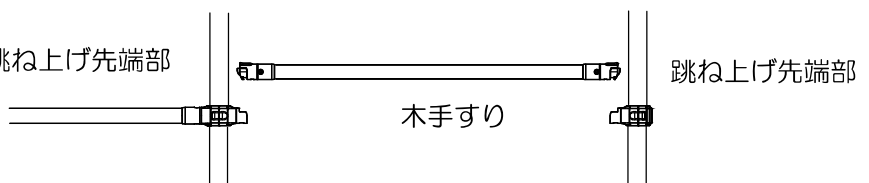


注意：取り外しには伸縮手すりは使用できません。

●オフセット 3 連結例

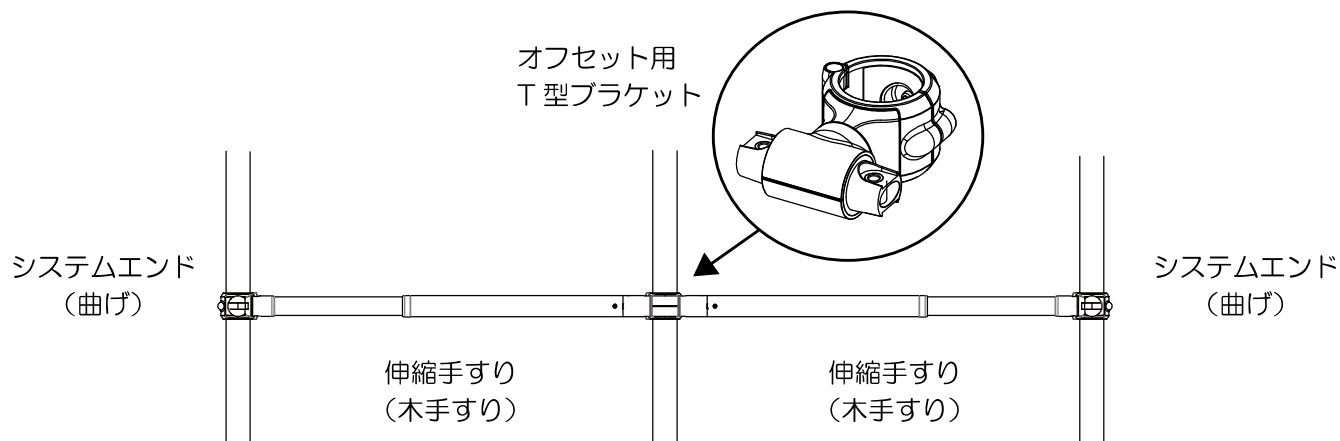

ウェーブ型 (他のオプション) - 横手すり連結

連結と同様の方法で、ウェーブ・b 型・b 型ロング・D 型・I 型ロング・グリップアームと組み合わせることが可能です。動作補助と移動補助のつながりをよくする提案になります。

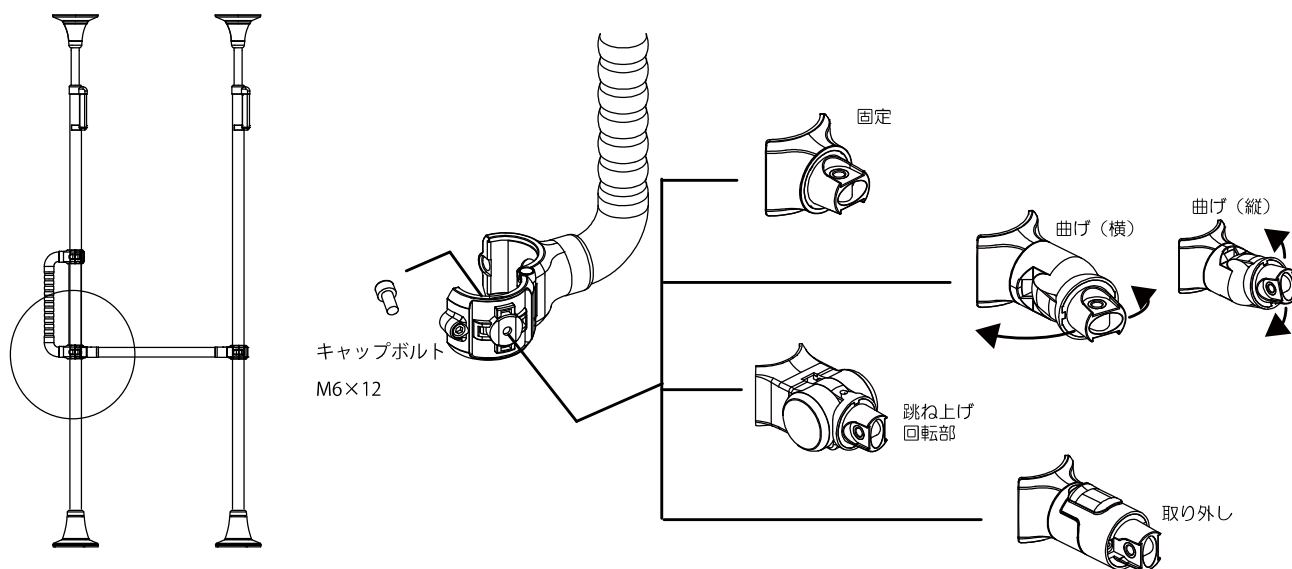

製品・施工関係問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社

〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里2-4-1
TEL.06-6754-0625 Fax.06-6758-6485

東京
TEL.03-5818-0621 Fax.03-5818-0624

名古屋
TEL.052-459-3004 Fax.052-453-1277

福岡
TEL.092-686-9300 Fax.092-686-9260

在庫・発送状況問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社 受注センター

〒693-0043 島根県出雲市長浜町516-46
TEL.0853-28-0521 Fax.0853-28-2128

■商品の仕様・説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。

製造元 **ホクメイ株式会社**

総販売元 **DIPPERホクメイ株式会社**
URL <http://www.dipper-hokumei.co.jp>

20240430Web