

ベスポジ^e

BEST POSITION BAR

基本セット ロングタイプ




特 徴

POINT 天井高さ最大3mまで対応!



ベスポジ-eの従来品より30cm長くし、
2m20cm～3mの範囲に取り付けが
出来ます。

POINT 取付方法はベスポジ-eと同じです

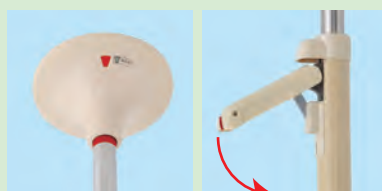

①天井に当てて

②レバーを下ろす


取付方法は、これまでのベスポジ-eと
全く同じです。

POINT 天井の高いところに



一般家屋の居室に比べて天井が高い場所での
設置に向いています。その他、病院・施
設などの天井高にも対応可能です。

P R I C E

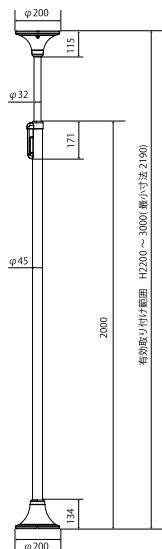

基本セットロングタイプ(丸型ベース)


メーカー希望
小売価格 **¥55,000(税込)**

品 番	TAIS コード
BPE-100-21	00254-000354

基本セットロングタイプ耐水(丸型ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥60,500(税込)**

品 番	TAIS コード
BPE-100-31	00254-000356

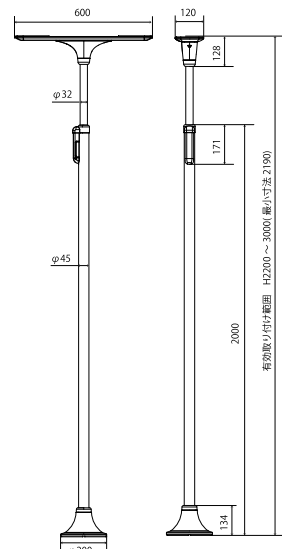

基本セットロングタイプ(T型ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥56,100(税込)**


品 番	TAIS コード
BPE-100-20	00254-000353

基本セットロングタイプ耐水(T型ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥61,600(税込)**

品 番	TAIS コード
BPE-100-30	00254-000355


取り付け方法

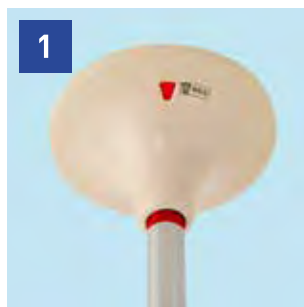


上部パイプを伸ばし、天井にピツタリと付けます。



ベースが垂直であることを確認し、固定レバーを下げます。

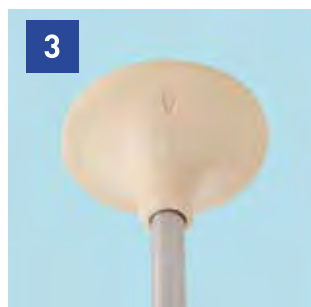

天井ベース下の赤ラインと天井ベースの確認窓の赤ラインが消えたことを確認します。

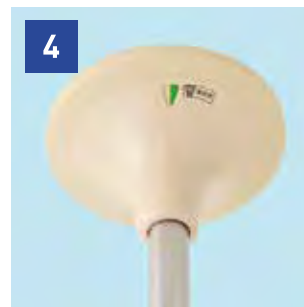

確認窓に緑が見えている場合、負荷が強いので再度付け直してください。
(解除が必要な場合は5mm六角レンチが必要です)

注意

- 赤ラインが消えなければ、取り付け面が弱い、突っ張り圧が弱いので再設置してください。
- 天井ベース確認窓に緑が出ると突っ張り圧が強く、天井に強い負荷がかかっています。再設置してください。

DIPPER ホクメイ 株式会社

東京本社：東京都台東区東上野1-7-5 TEL03-5818-0621
大阪本部：大阪市生野区新今里2-4-1 TEL06-6754-0625
中部営業所：名古屋市中村区亀島2-26-4 TEL052-459-3004
福岡営業所：福岡市博多区博多駅東2-18-30 TEL092-686-9300
受注センター：島根県出雲市長浜町516-46 TEL0853-28-0521