

# 空間手すりシステム ベストポジションバー専用アーム

# 取扱説明書

## ★「ベストポジションバー」を安全にご使用していただくために！

ベストポジションバーとは、ベッドや布団などの寝具からの「起き上がり動作」また、座った状態からの「立ち上がり動作」や「移動動作」及び「移乗動作」などを補助する自立支援を目的とした福祉用具です。

天井と床の間を突っ張り、空間に取付けできる利点がありますが、ネジやクギで固定しないため、誤った取付けや使用をするとケガをする恐れがあります。

ベストポジションバーの「取扱説明書」をよくお読みになり、日常点検を行ったうえで安全にご使用ください。

## ★使用上の注意 安全のため必ずお守りください。



アームを無理やり回したり、横方向や上方向へ引っ張ったりしないでください。

本体が外れ転倒し、重大事故につながります。




アーム類をご使用の際は、すき間に手や足、頭が入らないように十分注意してください。

すき間にいると重大事故につながります。



利用者が自分の身体を安定させられない場合は、介助者が付き添ってください。

本体が外れ転倒し、重大事故につながります。

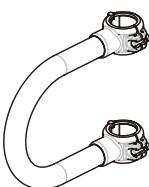


BP-110

丸型滑り止めシート  
(両粘着)付属



BP-400

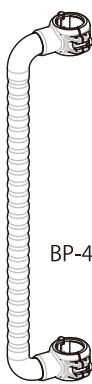


BP-410

### 木製アーム

自然木の温かみのある手すり


手すり部	集成材
プラケット部	アルミダイカスト・ステンレス・ ウレタンゴム

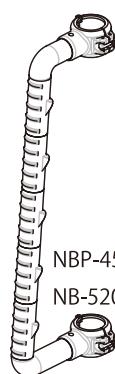


NBP-450-10



NB-520  
NBP-450-20  
NB-520-20

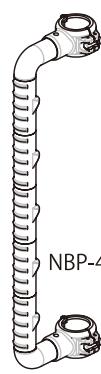

NBP-450-30

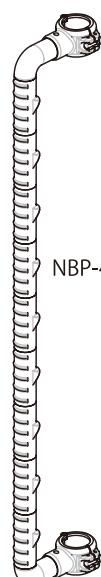

NBP-450-40

### 樹脂アーム

独自形状の滑り止め手すり

手すり部	エラストマー・ナイロン・アルミ
プラケット部	アルミダイカスト・ステンレス・ ウレタンゴム

## 日常のお手入れ方法

### ★カビや滑りを防止するためにお手入れをしてください。

- 日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しそく絞って汚れをふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。
- 汚れが目立つ場合は、柔らかい布に適量に薄めた中性洗剤を浸しそく絞って汚れをふき取った後、柔らかい布に水を浸しそく絞って洗剤分をふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。



## 空間手すりシステム

# ベストポジションバー専用アーム 取付説明書

BP-110, BP-400, BP-410 NBP-450-10,20,30,40 NB-520,NB-520-20

### 販売店・施工業者の方へ

- この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
取付けは必ず、販売店、施工業者の方で行ってください。取付け前に必ずこの説明書をよくお読みになり取付けてください。取付け後は、ベストポジションバーの取扱説明書とこの説明書の十分な説明を行ったうえでご利用者にお渡しください。
- 滑り止めは消耗品です。ヘタリや摩耗、汚れなどがある場合は交換して下さい。


### ★「ベストポジションバー」を安全に設置・ご使用していただくために！

ベストポジションバーとは、ベッドや布団などの寝具からの「起き上がり動作」また、座った状態からの「立ち上がり動作」や「移動動作」及び「移乗動作」などを補助する自立支援を目的とした福祉用具です。  
天井と床の間を突っ張り、空間に取付けできる利点がありますが、ネジやクギで固定しないため、誤った取付けや使用をするとケガをする恐れがあります。  
取付けの際は、取付け状況や利用者の状態を十分ご確認の上取付けてください。


### ★取扱上の注意！



BP-110  
BP-400  
BP-410

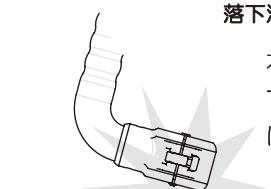


木製品は落下などの衝撃  
で木部が割れます。取扱  
に十分ご注意ください。

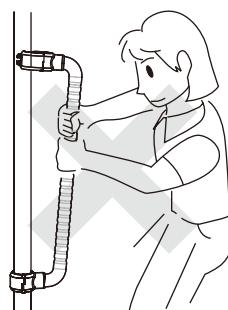

注意

取外し時、滑り止めが外れ  
にくくなっている場合がござ  
いますが、強引に引っ張  
らないでください。木部が  
割れます。ラベル剥がしを  
吹き付け、しばらくしてか  
ら取外してください。  
滑止めを交換してください。

### ○アームの取付手順

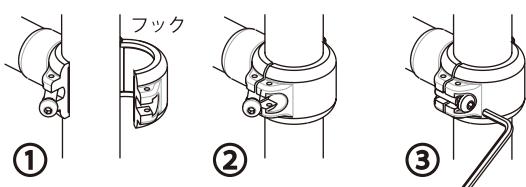

- ①上下フックを開けポールの取付け位置に合わせます。
- ②方向を合わせフックをひっかけ仮止めを行います。
- ③六角レンチ5mmで固定用ボルトをしっかりと締めます。



アームは、使用方法によりポールが回転します。  
回転方向への力が加わらないように使用方法を説明して  
ください。また、同梱の両粘着シートか別売の大型ベー  
スを使用し回転を防止してください。



アームを取付けて、本体に回転が  
生じる場合は、別売の大型ベース  
を取付けご使用ください。

