

## 洗浄・消毒標準作業方法

### 通常の場合

#### 1. 清拭き

対象製品：全製品

柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しよく絞って汚れを拭き取り、必ず乾いた布で水分を十分拭き取り乾かしてください。

注意事項：中性洗剤を使用した場合は、水拭きし洗剤分を拭き取り、必ず乾いた布で水分を十分拭き取り乾かしてください。

#### 2. 消毒

エタノール消毒

### 汚れのひどい場合

#### 1. 高圧洗浄

対象製品：ベスポジ－e樹脂パイプ、下部ベース（滑り止めは外してください。）

注意事項：上記以外は高圧洗浄しないでください。

※注意シール等が剥がれる恐れあり。

#### 2. 水分の拭き取り・乾燥

本体パイプから下部ベースを取り外し、水分を拭き取り十分に乾燥してください。

下部ベースは、逆さまに置き水分を抜き、必ず水分を十分拭き取り乾かしてください。点検マニュアル参照。

注意事項：性能劣化を防ぐため十分に乾かしてください。

#### 3. 消毒

エタノール消毒