


天井 補強バー取扱説明書

販売店様へ 製品の施工は必ず、販売店、施工業者の方で行ってください、この取扱説明書はご使用になられるお客様へお渡しください。

ユニットバス天井パネルの補強


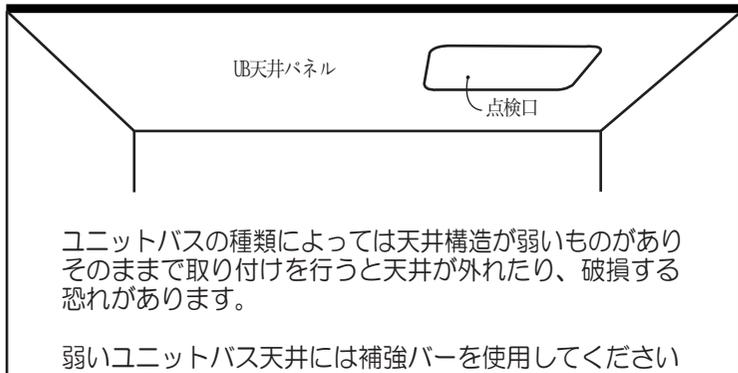


ユニットバスの種類によっては天井構造が弱いものがありそのまま取り付けを行うと天井が外れたり、破損する恐れがあります。


弱いユニットバス天井には補強バーを使用してください

天井パネルの点検口をあけて、建物本来の天井とユニットバスの天井パネルとの間に補強バーを図の手順で取付けてください、ユニットパネルのタワミを防ぎます

強度のあるユニットバスでも長期間取り外さない場合は補強バーの設置をお勧めいたします。

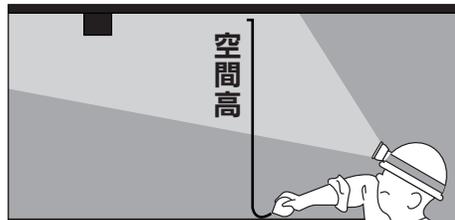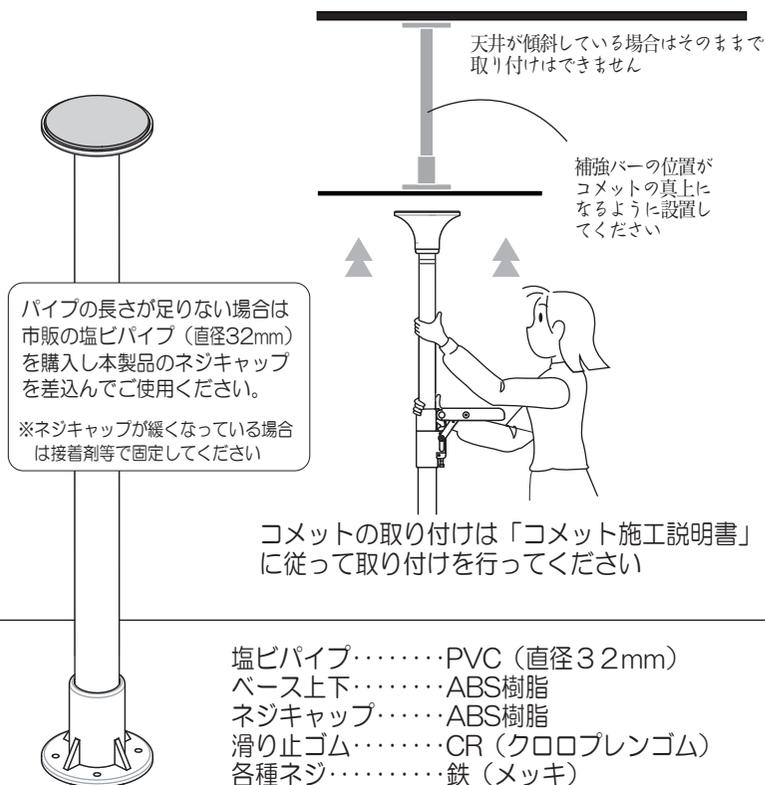


点検口を開けコメットの取り付け位置の真上の空間高さを測ってください

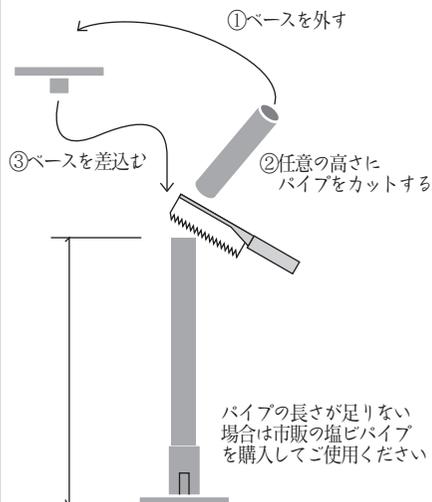

空間高さにあわせパイプをカットしてください

パイプカット寸法 = (空間高 - 2.5cm)

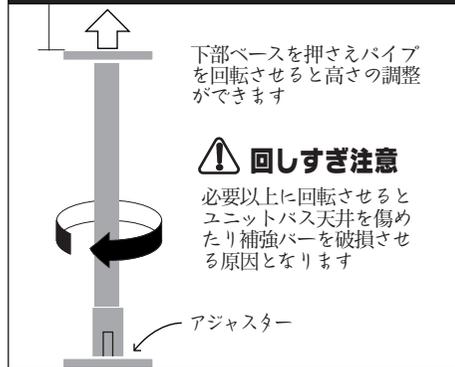

補強バーを設置しパイプを回転させアジャスターを上げ天井高まで伸ばしてください