



ベストポジションバー・システム

要保存

コメット・アーム「フープ」

取扱・施工説明書

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

NB-530

販売店様へ

製品の施工は必ず、販売店、施工業者の方で行ってください。

この施工・取扱説明書はご使用になられるお客様へお渡しください。

安全上の注意

安全のため必ずお守りください。

- これから示す内容は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 表示内容を見逃した使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- 安全のため使用する部品（製品）はホクメイ純正品をお使いください。純正品以外でのトラブルは保証できない場合があります。

（下記は絵表示の一例です。）



警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は「損害を負う可能性や物質損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りしていただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

基本セット内容

はじめに数の確認をしてください。

- ①手すり本体……………1本
・M5ワッシャ付ボルト…4本
- ②施工・取扱説明書……1冊
- ③六角レンチ4mm ……1本
- ④専用キャップ…………2ヶ

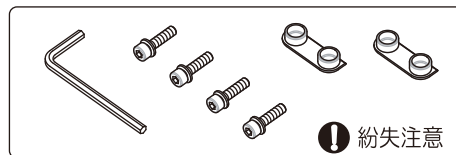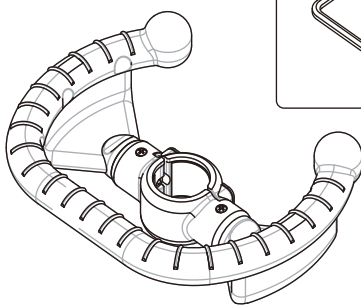


コメット・アーム「フープ」取り付け手順

施工上の注意・警告

ご使用になる前にお読みください。

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ⊘ | 当社が指示している使用方法及び、使用場所以外での取付けはおやめください。 |
| ❗ | 天井・フロタブ強度の確保されたところに確実に取り付けください。 |
| ⊘ | 手すり以外のご使用はおやめください。 |
| ⊘ | 仮設置状態での使用はおやめください手すりが外れて危険です。 |

各部の名称および素材


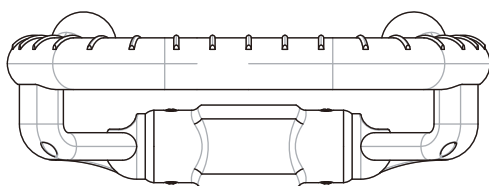


フープ手すり……エラストマー・ナイロン
ブラケット……アルミダイキャスト
アーム……ポリアミド
キャップ……樹脂（PP）
内側滑り止……ポリウレタン
各種ネジ……ステンレス

1

「コメット」を取り付ける

取り付けの際は「浴槽用手すりコメット施工説明書」に従って取り付けを行ってください。

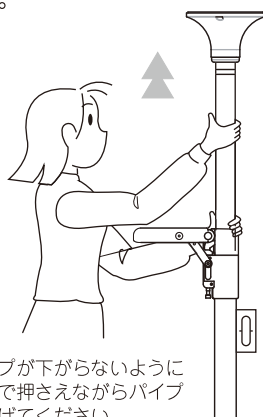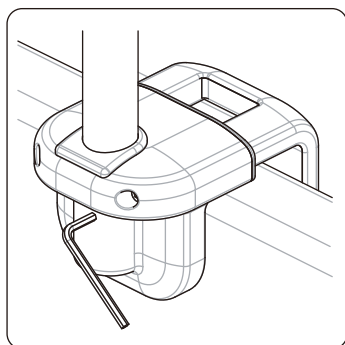

市販の水平器などを使用して垂直に立ててください。



90°（垂直）

パイプが下がらないように両手で押さえながらパイプを上げてください。


2

ボルトを外します

ブラケット側面のボルト（4ヶ所）を付属レンチで外して下さい。（❗ボルト紛失注意）

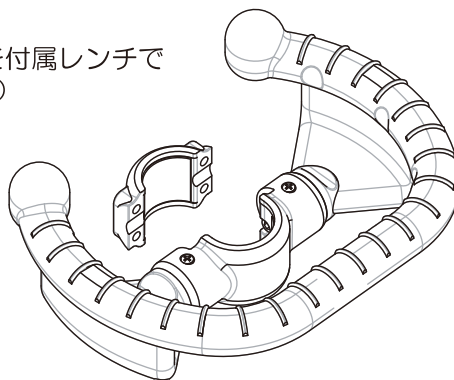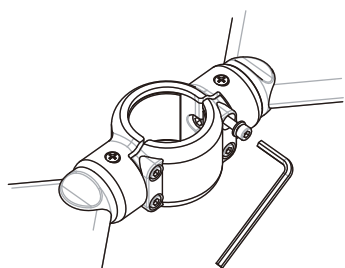


サイドガードを外します

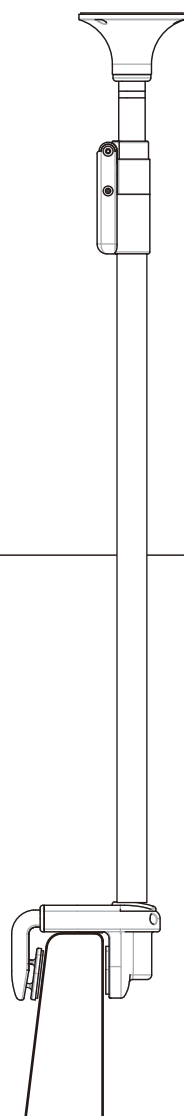


3

ブラケットを仮固定し高さを合わせる

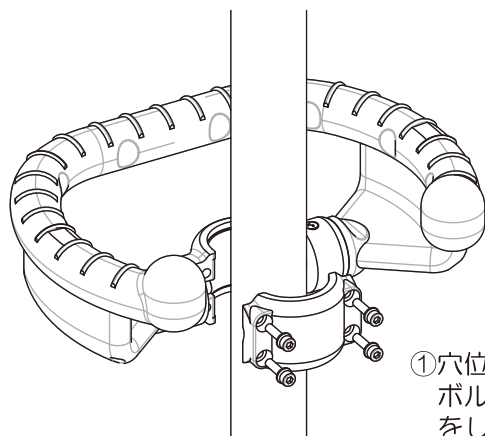



①穴位置を合わせ
ボルトの仮付け
をしてください。

②高さを合わせ、4ヶ所のボルトを
レンチで均等に締めてください。

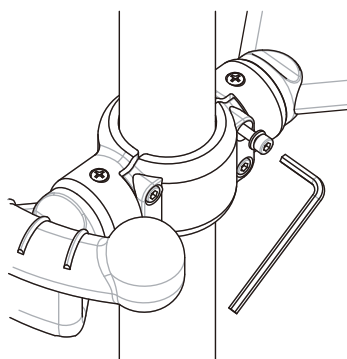

4


取り付け強度の確認をする

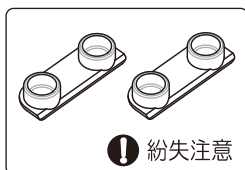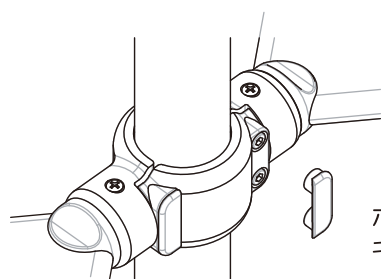


❗ 紛失注意

ボルト取り付け位置に
キャップを差し込みます。

アーム部にゆがみ等がなく
しっかり取り付いている事
を確認してください。

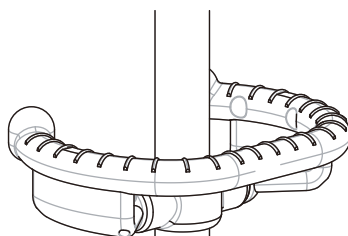

取り付け位置の変更

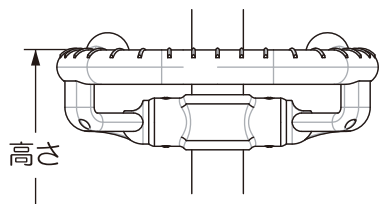


高さ

高さを変える場合は、
ボルトを少し緩めて
高さの調整を行って
ください。

任意の位置にセットできましたら、
しっかり付いているか取り付け確認をしてください。

取 付 確 認	垂直に立っている	☐ OK ☐ NG (再取付)
	黄色リボンが隠れている	☐ OK ☐ NG (再取付)
	固定ボルトを取り付けている	☐ OK ☐ NG (再取付)
	ぐらつきなどがない	☐ OK ☐ NG (再取付)

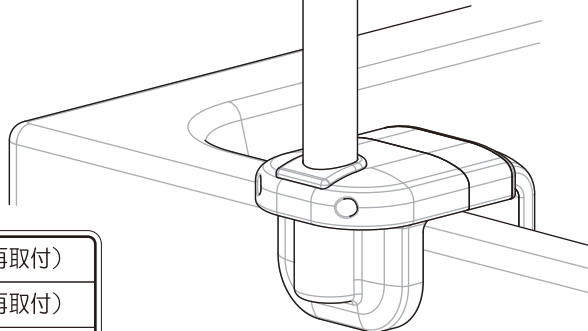

使用に関する警告・注意


ご使用になる前にお読みください



必ず定期点検をしてください

必ず実行

- 黄色リボンが見えている
- まっすぐに立っていない
- 固定ボルトが付いていない
- 手ずりが動く、ぐらつく

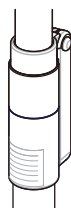


上記のような現象がみられたら取扱店にお問い合わせください。



分解禁止

分解・改造はしないでください。

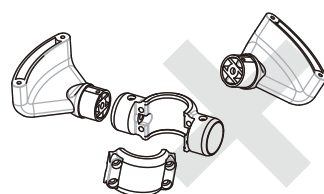


禁止

アームを無理に回したりしないでください。




禁止

急激な衝撃はかけないでください。

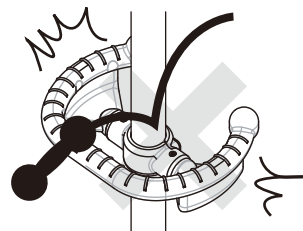

禁止

上方向への力はかけないでください。

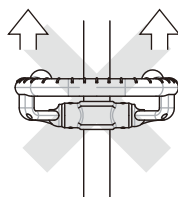


本体が外れるなどして
思わぬ事故を招く恐れ
があります。



禁止

ぶら下がったり、のぼったり
しないでください。

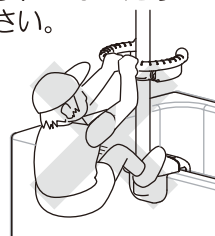

製品をコメット本体に設置する際、体が挟まり込む程度の隙間をあけて設置してしまうと、その隙間に体が落ち込んで重大事故の起因となります。製品の設置に際しましては、壁面のみならず周辺機器等との隙間に関して十分ご注意ください。ご利用者様が挟まらない位置に設置してください。ご利用者様に転倒の可能性がある場合は、必ず、介助者と使用していただくか、ご使用をお控えください。また、その隙間に手足や腕を挟まれることのないように十分ご配慮し、設置をしてください。

◆日常のお手入れと点検◆

お手入れは中性洗剤を使用してください。

アルカリ性、酸性などの洗剤は使用しないでください。

樹脂部の劣化の原因となります。

研磨材入りの洗剤は本体にキズがつきカビの原因になります。



本製品は長期間の使用に耐えるように設計されていますが、熱・使用頻度・湿気・汚れ等の影響により部品が安全性を損なって事故につながる恐れがあります。時々、製品強度をチェックして異常と思われる箇所が見つかった場合、事故防止の為にすぐにご購入店にご相談ください。