

# マスカット ポールタイプ 取り付け手順

1



取付位置の浴槽縁幅の計測します。

2



アクリルシート貼り付けます。  
(位置決め)

3




アームの長さを調節し挟み込み部を  
浴槽縁に置いて確認をします。

4



ポール本体と挟み込み本体を組立て、  
挟み込み本体を浴槽縁に水平になる  
高さにポールと固定します。

5

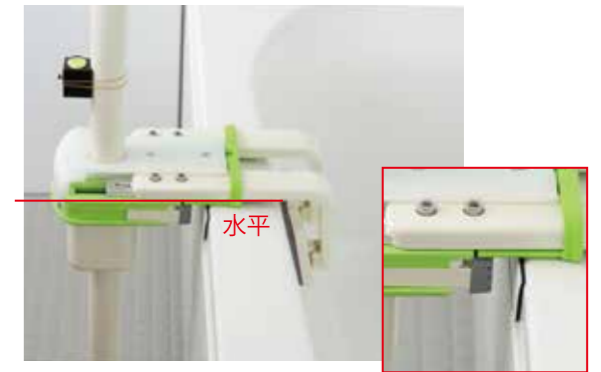

挟み込み本体が水平になるように浴槽  
縁に置きます。

6-1



水平が維持されている事に  
注意して締めます。

6-2



リム込むの後ろの隙間がなくなるまでアームを締めます。



6-3



固定プレートを浴槽面に密着するまでアームを締め、アームを浴槽側から押さえ固定プレートに挟み込み本体を寄せていくイメージで固定プレートの赤ラインが消えるまでアームを締めます。



7



ポールが垂直に立っているか確認します。

8



天井ベースの剥離紙をはがし、内ポールを天井まで伸ばします。

9



調整穴にレンチをさし、回して内パイプを伸ばし天井ベースの赤ラインを消します。

10



内パイプの固定リングを締めて、  
赤ラインを消して固定します。

11



挟み込み本体にカバーをします。