


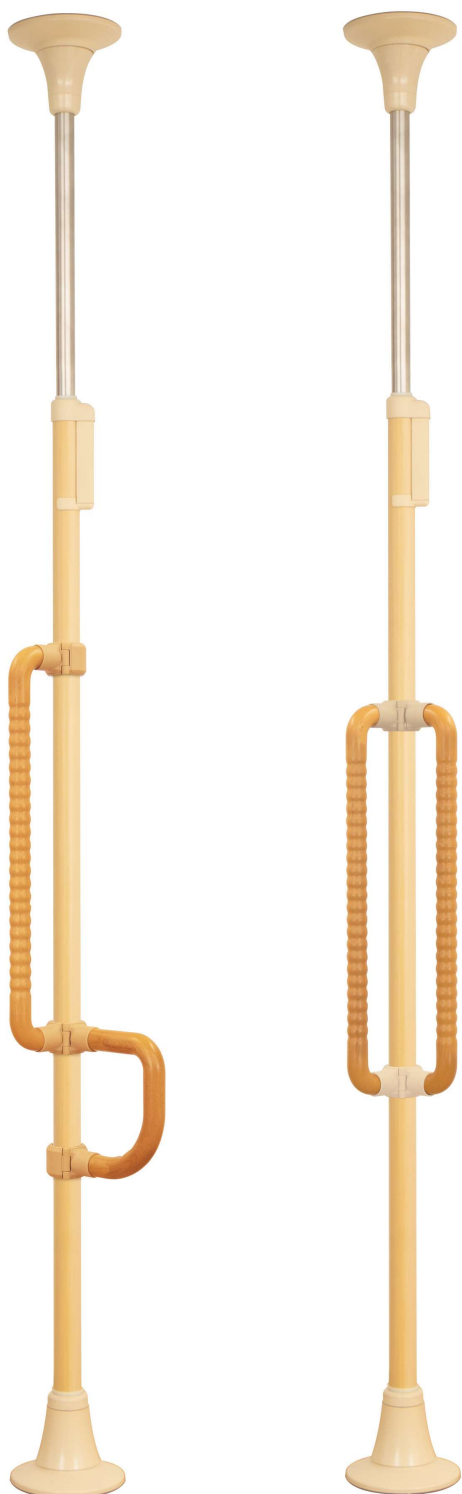

*our best position bar continue evolving*

# BPZ



伸縮ロックレバー



専用垂直器  
W ロック機能




# ベスポジ **BPZ** concept


## 1. レバーが伸ばせることによりロックがより容易になった




設置手順

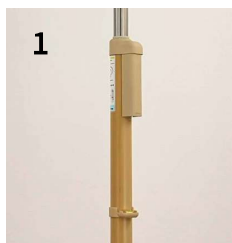

1  
レバーストッパーの垂直器を下に下げます。  
※垂直器の中心が見やすい位置に下げます。

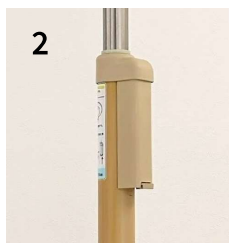

2  
レバーストッパーを手前に引き出すとロックが解除されます。  
※カチッと音が鳴ります。六角レンチが不要になりました。

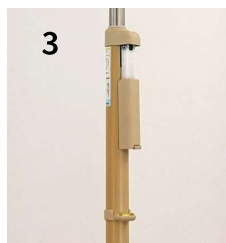

3  
レバーを最後まで下げます。  
※7cm レバーが長くなります。



4  
レバーを上を持ち上げると内パイプが伸縮できます。  
※レバーが長くなったことにより締付が容易になりました。

## 2. 専用垂直器が標準装備&W ロック機能



垂直器が収納できる  
W ストッパー機能



垂直器は可動・取り外しもできます。



ロック部アームにストッパーで固定します。

## 3. 抗ウイルス加工 感染症対策



ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

抗菌ウイルス加工剤：有機合成系・練込

パイプ被膜部  
JP0612520A0001S

製品表面に付着したウイルスの数を減少させることを抗ウイルスといいます。



初期



未加工製品



抗ウイルス加工製品

対象

練り込み部

外パイプ




## 基本セット

レギュラー

ショート

ロング

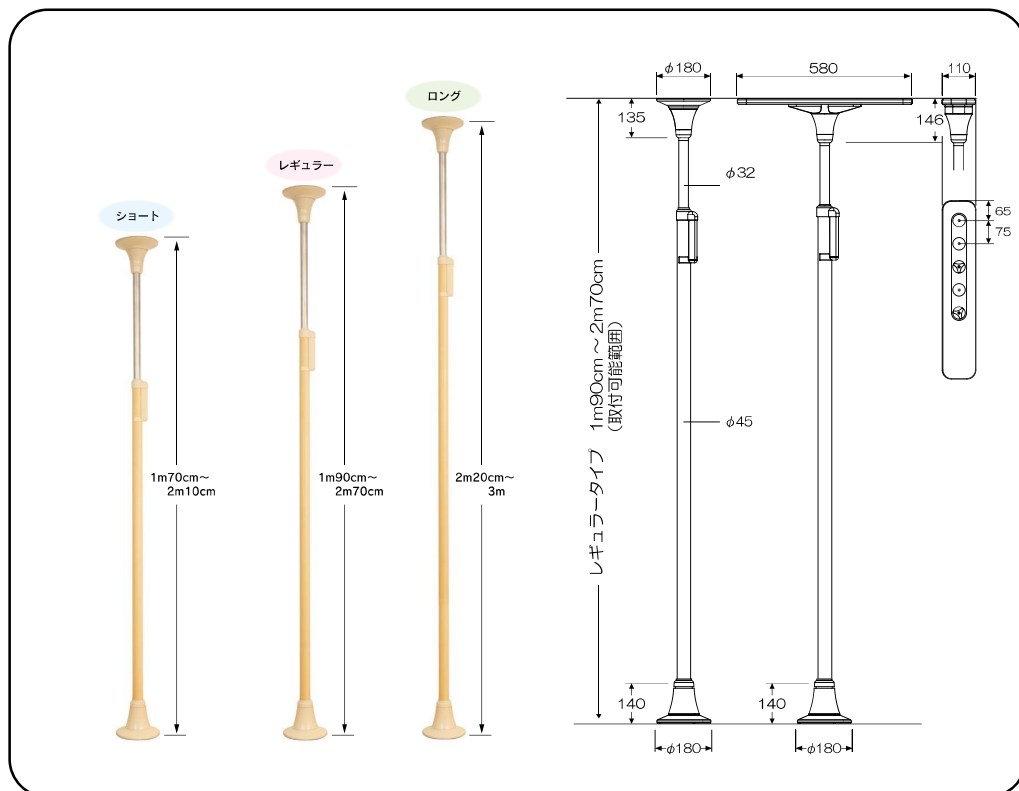

### 天井ロングベース



竿縁天井等で有効で、木板の端部にも組替えが可能です。

### 基本体カバー



立位保持や丸型・角型等の使用時にカバーに肩を当てることで回転動作が容易になります。

#### ベスポジ 基本セット価格



| 品名                             | 品番          | 価格 (税込) | 価格 (税別) | TAIS         |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー            | BPZ-100-10  | ¥55,000 | ¥50,000 | 00254-000410 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー クッションカバー付き | BPZ-100-10C | ¥58,850 | ¥53,500 | 00254-000411 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート             | BPZ-100-20  | ¥57,200 | ¥52,000 | 00254-000412 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート クッションカバー付き  | BPZ-100-20C | ¥61,050 | ¥55,500 | 00254-000413 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング              | BPZ-100-30  | ¥57,200 | ¥52,000 | 00254-000414 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング クッションカバー付き   | BPZ-100-30C | ¥61,050 | ¥55,500 | 00254-000415 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー            | BPZ-100-50  | ¥55,000 | ¥50,000 | 00254-000416 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー クッションカバー付き | BPZ-100-50C | ¥58,850 | ¥53,500 | 00254-000417 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート             | BPZ-100-60  | ¥57,200 | ¥52,000 | 00254-000418 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート クッションカバー付き  | BPZ-100-60C | ¥61,050 | ¥55,500 | 00254-000419 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング              | BPZ-100-70  | ¥57,200 | ¥52,000 | 00254-000420 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング クッションカバー付き   | BPZ-100-70C | ¥61,050 | ¥55,500 | 00254-000421 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水         | BPZ-100-80  | ¥60,500 | ¥55,000 | 00254-000422 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水          | BPZ-100-81  | ¥62,700 | ¥57,000 | 00254-000423 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水           | BPZ-100-82  | ¥62,700 | ¥57,000 | 00254-000424 |

# TWIN 手すり

## 特徴

ブラケットを左右又は上下を組み替えることにより、1種類で90°、135°、180°の組み合わせが可能になりました。

レンタル申請も1つのTAISコードで出来ます。  
アセスメント・モニタリング時にも有効

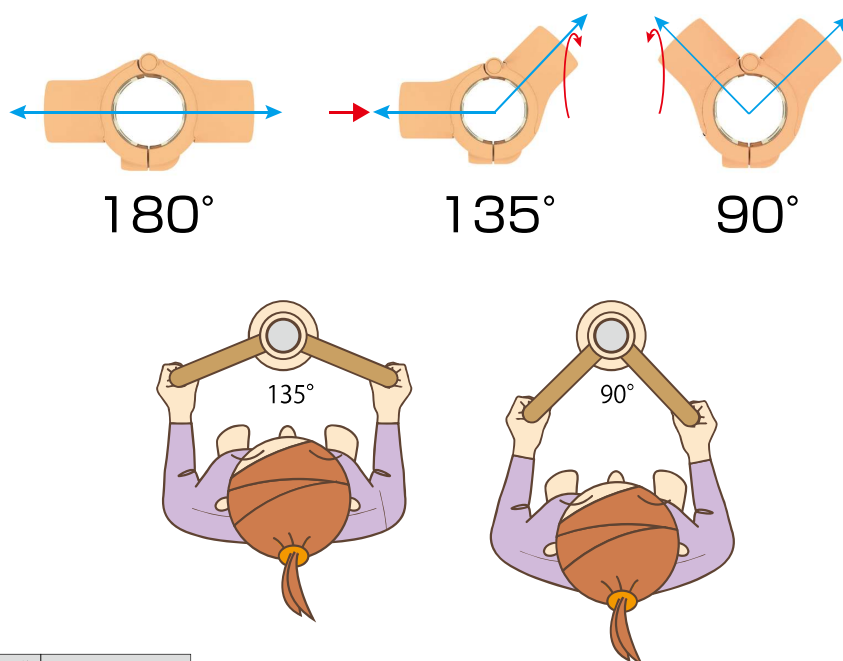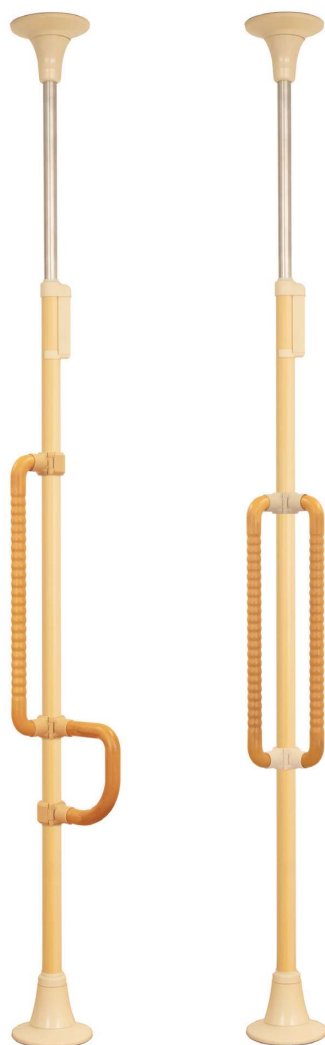

### ツイン手すり W+D 単品価格

| 品名         | 品番      | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|------------|---------|---------|---------|--------------|
| ツイン手すり W+D | BPZ-300 | ¥33,000 | ¥30,000 | 00254-000425 |

### ツイン手すり W+W 単品価格


| 品名         | 品番      | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|------------|---------|---------|---------|--------------|
| ツイン手すり W+W | BPZ-310 | ¥31,900 | ¥29,000 | 00254-000432 |

### ツイン手すりセット価格


|             | 品名                                  | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| W<br>+<br>D | ベースポジ BPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+D セット | BPZ-300-10 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000426 |
|             | ベースポジ BPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+D セット  | BPZ-300-20 | ¥90,200 | ¥82,000 | 00254-000427 |
|             | ベースポジ BPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+D セット   | BPZ-300-30 | ¥90,200 | ¥82,000 | 00254-000428 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+D セット | BPZ-300-50 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000429 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース ショート ツイン手すり W+D セット  | BPZ-300-60 | ¥90,200 | ¥82,000 | 00254-000430 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース ロング ツイン手すり W+D セット   | BPZ-300-70 | ¥90,200 | ¥82,000 | 00254-000431 |
| W<br>+<br>W | ベースポジ BPZ 丸ベース レギュラー ツイン手すり W+W セット | BPZ-310-10 | ¥86,900 | ¥79,000 | 00254-000433 |
|             | ベースポジ BPZ 丸ベース ショート ツイン手すり W+W セット  | BPZ-310-20 | ¥89,100 | ¥81,000 | 00254-000434 |
|             | ベースポジ BPZ 丸ベース ロング ツイン手すり W+W セット   | BPZ-310-30 | ¥89,100 | ¥81,000 | 00254-000435 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース レギュラー ツイン手すり W+W セット | BPZ-310-50 | ¥86,900 | ¥79,000 | 00254-000436 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース ショート ツイン手すり W+W セット  | BPZ-310-60 | ¥89,100 | ¥81,000 | 00254-000437 |
|             | ベースポジ BPZ Tベース ロング ツイン手すり W+W セット   | BPZ-310-70 | ¥89,100 | ¥81,000 | 00254-000438 |




# TWIN 手すり W+W 型 組替え

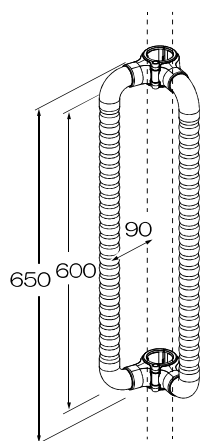


ツイン手すりW+W

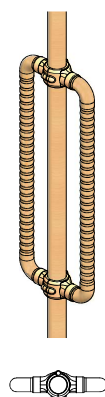

180°

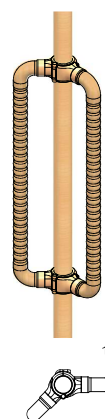


135°

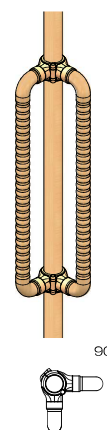


90°


# TWIN 手すり W+D 型 組替え

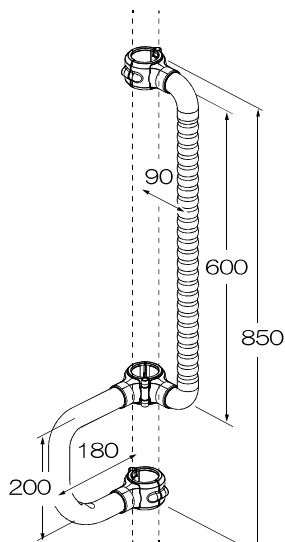


ツイン手すりW+D

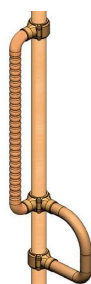


90°

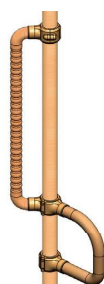

135°

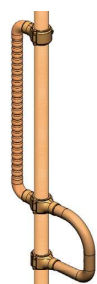


180°

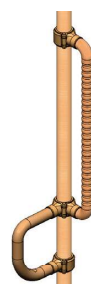


90°




135°

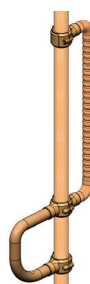


180°

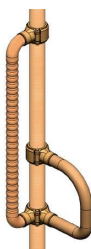


90°

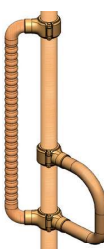


135°

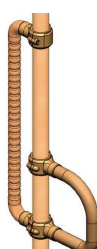


180°

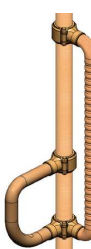

90°



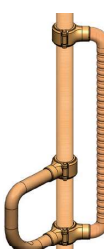


135°

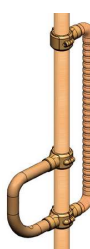


180°

90° から 135° への組み替え例

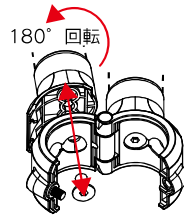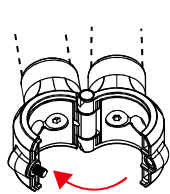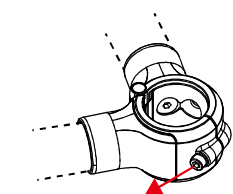


180° 回転

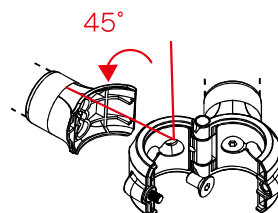

45°

ポイント：手すりが付いた状態のエンドを上下逆にすると向きが変わります。

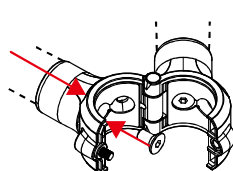


135° の場合



180° の場合

片出し+カバーの場合

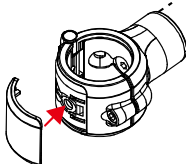

ストレート  
or  
45° のみ

プッシュ手すり


使用手順



プッシュ手すりを自分の利き手の横少し前にして座ります。




手のひらで手すりを押さえるようにして体重を乗せ、身体を安定させます。

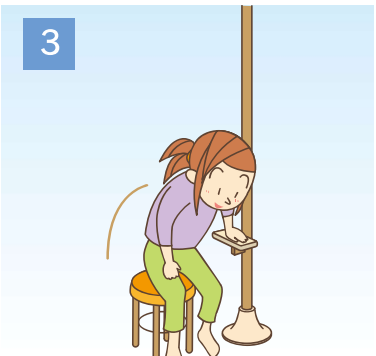

手のひらでプッシュアップするように上半身を持ち上げていきます。




腕を伸ばして、上半身を起こすと同時に膝を伸ばし、立位をとっていきます。

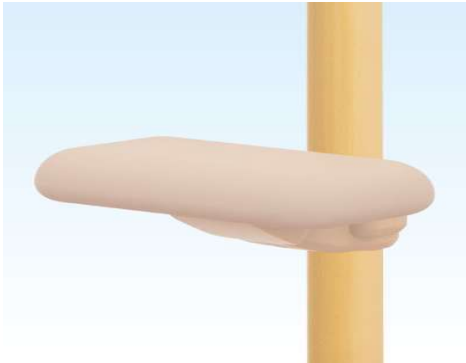

仕様

|       |                |
|-------|----------------|
| 手すり径  | φ45 クッション外縁    |
| 手すり部  | エラストマー         |
| ブラケット | PA             |
| 付属品   | 説明書・5 mmレンチ    |
| 商品重量  | 1.05kg         |
| 商品寸法  | (258×215×94.5) |

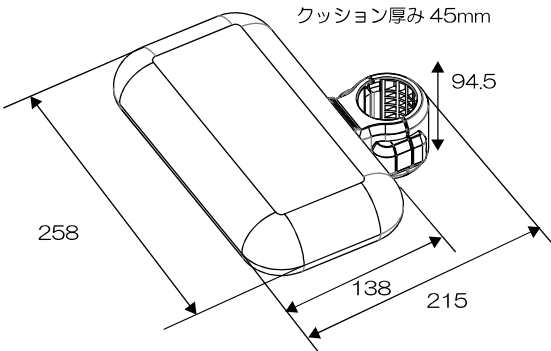


プッシュ手すり 単品価格

| 品名      | 品番      | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------|---------|---------|---------|--------------|
| プッシュ手すり | BPZ-400 | ¥30,800 | ¥28,000 | 00254-000439 |

プッシュ手すりセット価格

| 品名                             | 品番         | 価格 (税込) | 価格 (税別) | TAIS         |
|--------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー プッシュ手すりセット | BPZ-400-10 | ¥85,800 | ¥78,000 | 00254-000440 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート プッシュ手すりセット  | BPZ-400-20 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000441 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング プッシュ手すりセット   | BPZ-400-30 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000442 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー プッシュ手すりセット | BPZ-400-50 | ¥85,800 | ¥78,000 | 00254-000443 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート プッシュ手すりセット  | BPZ-400-60 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000444 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング プッシュ手すりセット   | BPZ-400-70 | ¥88,000 | ¥80,000 | 00254-000445 |


# 縦型・横型の組替え

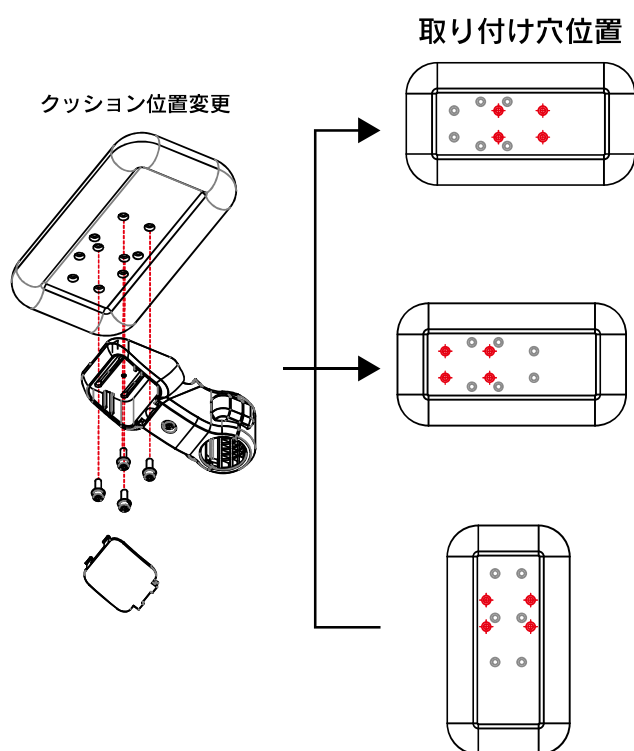

横設置の際、クッションをズラす  
縦設置の際、クッションの向きを変える






●中心取り付け（例）



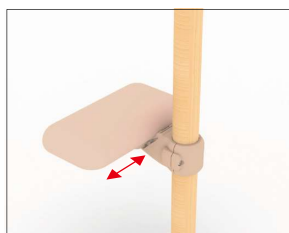


●ずらし取り付け（例）


## 横付け

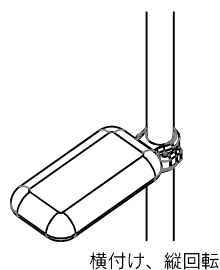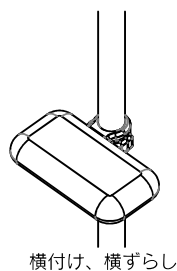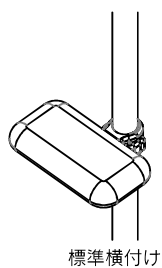




## 縦付け

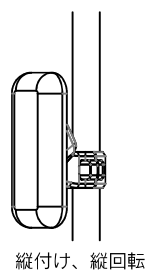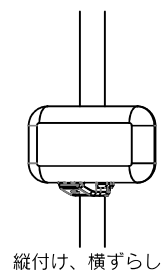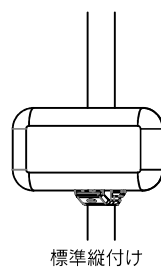


ブラケット  
組み替え

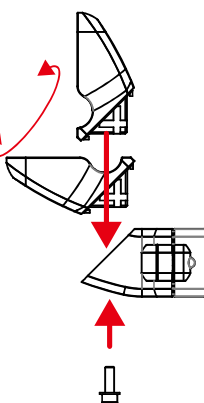

## 縦・横設置の組み替え

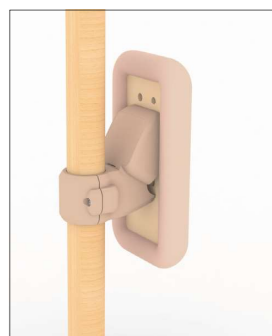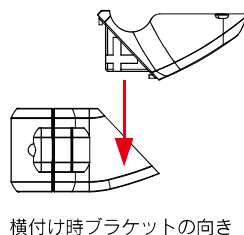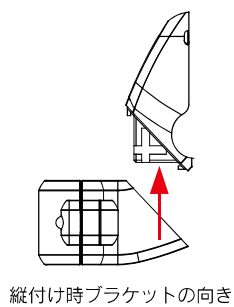

●縦取り付け（例）

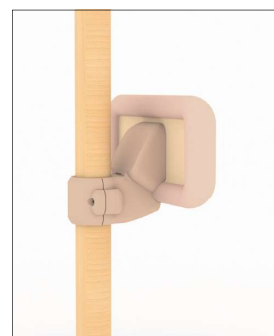


●横取り付け（例）

## b 型手すり

椅子からの立ち座り時に縦グリップ部だけではなく、大きめのカーブを手すりに設け、さらに握りやすいよう凹凸もつけることで、手が滑りにくいよう工夫しています。



### 使用手順

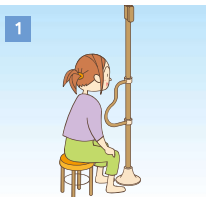

1 手すりを握りたい腕の側に設置します。



2 手すりの上部の直線部を握ります。




3 反対側の手で手すりの下部を握り重心を前方に移動させていきます。



4 身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。



5 手すりの上部をつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

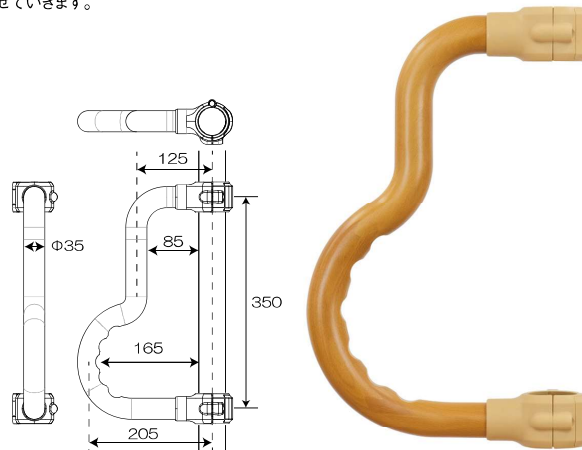

### b 型手すり単品価格

| 品名       | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------|------------|---------|---------|--------------|
| b 型手すり単品 | BPE-300-90 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000367 |

### b 型手すりセット価格

| 品名                                     | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー b 型 セット            | BPZ-600-10  | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000485 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー b 型 クッションカバー付きセット  | BPZ-600-10C | ¥80,850 | ¥73,500 | 00254-000486 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート b 型 セット             | BPZ-600-20  | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000487 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート b 型 クッションカバー付きセット   | BPZ-600-20C | ¥83,050 | ¥75,500 | 00254-000488 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング b 型 セット              | BPZ-600-30  | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000489 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング b 型 クッションカバー付きセット    | BPZ-600-30C | ¥83,050 | ¥75,500 | 00254-000490 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー b 型 セット           | BPZ-600-50  | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000491 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー b 型 クッションカバー付きセット | BPZ-600-50C | ¥80,850 | ¥73,500 | 00254-000492 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート b 型 セット            | BPZ-600-60  | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000493 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート 型 クッションカバー付きセット    | BPZ-600-60C | ¥83,050 | ¥75,500 | 00254-000494 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング b 型 セット             | BPZ-600-70  | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000495 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング b 型 クッションカバー付きセット   | BPZ-600-70C | ¥83,050 | ¥75,500 | 00254-000496 |


## b 型手すりロング

椅子からの立ち座り、床からの立ち座り時に縦グリップ部だけではなく、大きめのカーブを手すりに設け、さらに握りやすいよう凹凸もつけることで、手が滑りにくいよう工夫しています。




### 使用手順

1

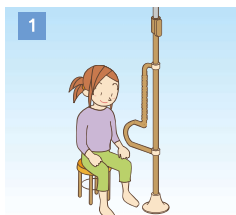


手すりを握りたい腕の側に設置します。

2

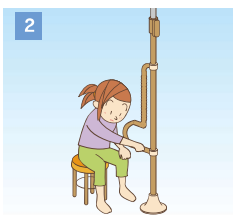


手すりの下部の直線部を握ります。

3

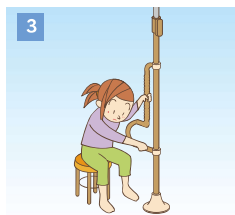

反対側の手を手すりの上部を握り重心を前方に移動させていきます。

4

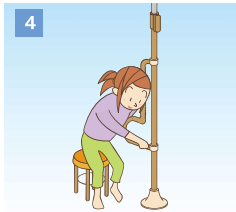


身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

5



手すりの上部をつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

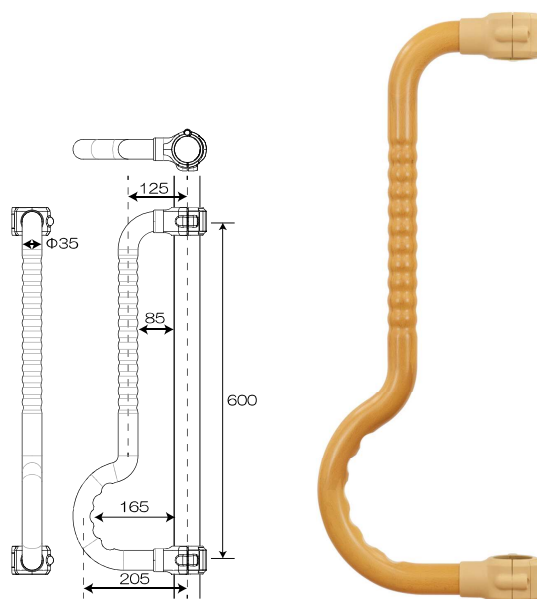

### b 型手すりロング単品価格

| 品名       | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------|-------------|---------|---------|--------------|
| b 型ロング単品 | BPE-300-100 | ¥24,200 | ¥22,000 | 00254-000368 |

### b 型手すりロングセット価格


| 品名                              | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー b 型ロング セット  | BPZ-610-10 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000497 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート b 型ロング セット   | BPZ-610-20 | ¥81,400 | ¥74,000 | 00254-000498 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング b 型ロング セット    | BPZ-610-30 | ¥81,400 | ¥74,000 | 00254-000499 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー b 型ロング セット | BPZ-610-50 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000500 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート b 型ロング セット  | BPZ-610-60 | ¥81,400 | ¥74,000 | 00254-000501 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング b 型ロング セット   | BPZ-610-70 | ¥81,400 | ¥74,000 | 00254-000502 |

## D 型手すり

椅子からの立ち座りに、正面または利き腕側（健側）に設置して、プッシュアップ利用できます。



### 使用手順

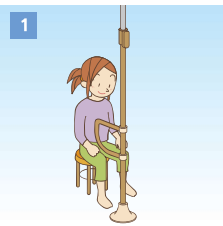


1 手すりを握りたい腕の側に設置します。



2 手すりの手前の直線部を握ります。




3 反対側の手で手すりの上部をつかみ前方へ重心移動させていきます。

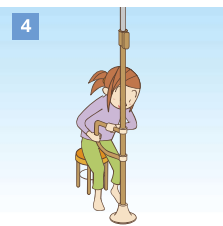

4 身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、プッシュアップし腰を浮かせていきます。



5 手すりをつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

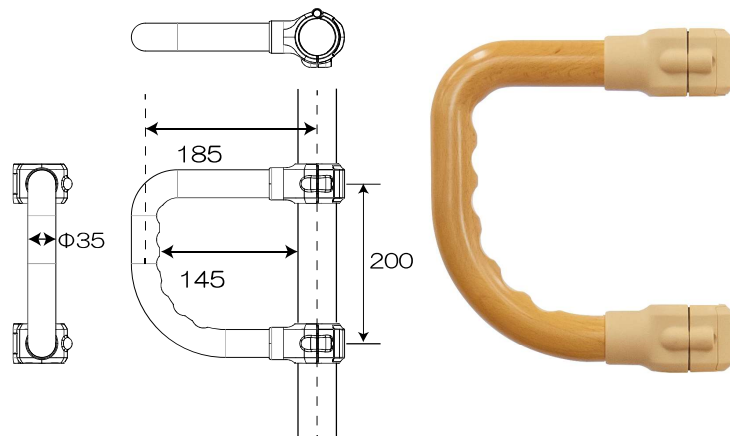

### D 型手すり単品価格

| 品名       | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------|-------------|---------|---------|--------------|
| D 型手すり単品 | BPE-300-110 | ¥16,500 | ¥15,000 | 00254-000369 |

### D 型手すりセット価格



| 品名                                      | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-----------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー D 型 セット             | BPZ-620-10  | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000503 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー D 型 クッションカバー付きセット   | BPZ-620-10C | ¥75,350 | ¥68,500 | 00254-000504 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート D 型 セット              | BPZ-620-20  | ¥73,700 | ¥67,000 | 00254-000505 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート D 型 クッションカバー付き セット   | BPZ-620-20C | ¥77,550 | ¥70,500 | 00254-000506 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング D 型 セット               | BPZ-620-30  | ¥73,700 | ¥67,000 | 00254-000507 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング D 型 クッションカバー付き セット    | BPZ-620-30C | ¥77,550 | ¥70,500 | 00254-000508 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー D 型セット             | BPZ-620-50  | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000509 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー D 型 クッションカバー付き セット | BPZ-620-50C | ¥75,350 | ¥68,500 | 00254-000510 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート D 型 セット             | BPZ-620-60  | ¥73,700 | ¥67,000 | 00254-000511 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート D 型 クッションカバー付き セット  | BPZ-620-60C | ¥77,550 | ¥70,500 | 00254-000512 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング D 型 セット              | BPZ-620-70  | ¥73,700 | ¥67,000 | 00254-000513 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング D 型 クッションカバー付き セット   | BPZ-620-70C | ¥77,550 | ¥70,500 | 00254-000514 |

## I型手すり

椅子からの立ち座り、床からの立ち座り、段差の昇降など、体の上下動が大きい動作に有効な長い手すりです。グリップボールに指が引っかかることで手が滑りにくいよう工夫しています。



### 使用手順

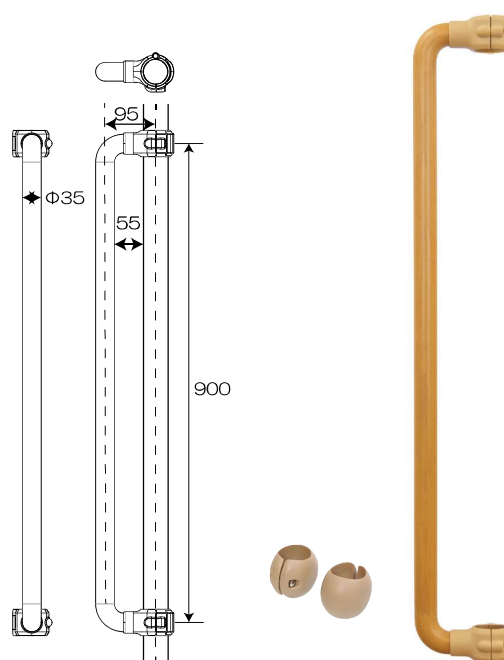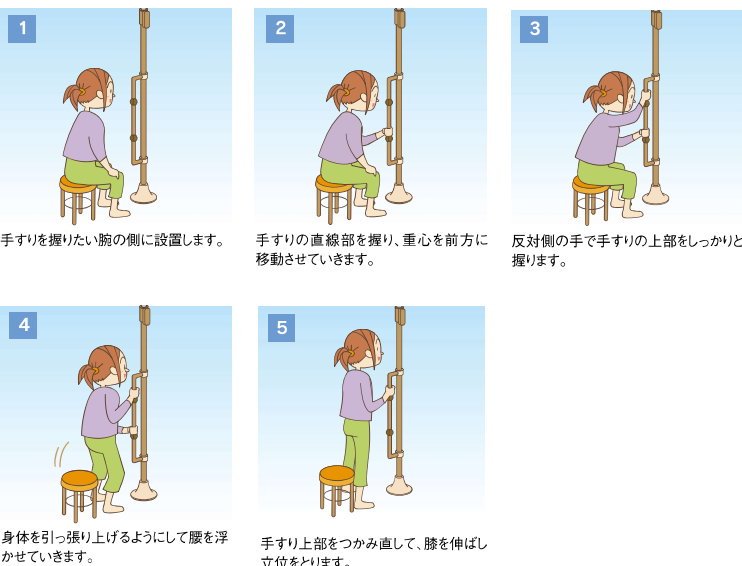

### I型手すり単品価格

| 品名      | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------|-------------|---------|---------|--------------|
| I型手すり単品 | BPE-300-120 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000370 |

### I型手すりセット価格

| 品名                         | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー I型 セット | BPZ-630-10 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000515 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート I型 セット  | BPZ-630-20 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000516 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング I型 セット   | BPZ-630-30 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000517 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー I型 セット | BPZ-630-50 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000518 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート I型 セット  | BPZ-630-60 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000519 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング I型 セット   | BPZ-630-70 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000520 |



## 円型手すり

立ち上がりから移乗動作において、移乗方向に制約がいからず、方向転換の際、手足の連動を生みやすくする手すりです。



円型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕をもって座ります。



手すりをつかみ、引き込むように、上半身を前傾させて、腰を浮かしていきます。



円型手すりにかぶさるように掴み、膝を伸ばしていきます。



手すりをつかみ、引き込むように、膝を支点にして腰を浮かせていきます。

円型手すり単品価格

| 品名      | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------|------------|---------|---------|--------------|
| 円型手すり単品 | BPE-300-20 | ¥27,500 | ¥25,000 | 00254-000131 |

円型手すりセット価格


| 品名                                    | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 円型 セット            | BPZ-700-10  | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000521 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 円型 クッションカバー付き セット | BPZ-700-10C | ¥86,350 | ¥78,500 | 00254-000522 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 円型 セット             | BPZ-700-20  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000525 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 円型 クッションカバー付き セット  | BPZ-700-20C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000526 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 円型 セット              | BPZ-700-30  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000529 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 円型 クッションカバー付き セット   | BPZ-700-30C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000530 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 円型 セット            | BPZ-700-50  | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000533 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 円型 クッションカバー付き セット | BPZ-700-50C | ¥86,350 | ¥78,500 | 00254-000534 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 円型 セット             | BPZ-700-60  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000537 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 円型 クッションカバー付き セット  | BPZ-700-60C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000538 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 円型 セット              | BPZ-700-70  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000541 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 円型 クッションカバー付き セット   | BPZ-700-70C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000542 |

## 円型手すり+プッシュ

立ち上がりから移乗動作において、移乗方向に制約がかからず、方向転換の際、手足の連動を生みやすくする手すりです。



端座位で座り、膝を膝当てに当てます。

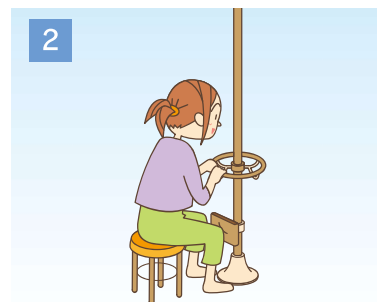

手すりもしくは支柱をつかみ、膝を支点にして上半身を前傾させて腰を浮かせていきます。



支柱に肩を当てるようにしながら上体を上げていきます。この時、膝は膝当てに付けたままです。



上体を伸ばし、立位を取ります。立位の際、膝の動揺がある場合、そのまま膝当てに膝を当て動揺を抑えながら立位を維持します。

### 円型手すり単品価格

| 品名    | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-------|------------|---------|---------|--------------|
| 円型手すり | BPE-300-20 | ¥27,500 | ¥25,000 | 00254-000131 |

### プッシュ手すり単品価格

| 品名      | 品番      | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------|---------|---------|---------|--------------|
| プッシュ手すり | BPZ-400 | ¥30,800 | ¥28,000 | 00254-000439 |

### 円型手すり+プッシュ手すりセット価格

| 品名                                   | 品番          | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|--------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 円型・プッシュ2点セット     | BPZ-700-12  | ¥113,300 | ¥103,000 | 00254-000523 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 円型・カバー・プッシュ3点セット | BPZ-700-13C | ¥117,150 | ¥106,500 | 00254-000524 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 円型・プッシュ2点セット      | BPZ-700-22  | ¥115,500 | ¥105,000 | 00254-000527 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 円型・カバー・プッシュ3点セット  | BPZ-700-23C | ¥119,350 | ¥108,500 | 00254-000528 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 円型・プッシュ2点セット       | BPZ-700-32  | ¥115,500 | ¥105,000 | 00254-000531 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 円型・カバー・プッシュ3点セット   | BPZ-700-33C | ¥119,350 | ¥108,500 | 00254-000532 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 円型・プッシュ2点セット     | BPZ-700-52  | ¥113,300 | ¥103,000 | 00254-000535 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 円型・カバー・プッシュ3点セット | BPZ-700-53C | ¥117,150 | ¥106,500 | 00254-000536 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 円型・プッシュ2点セット      | BPZ-700-62  | ¥115,500 | ¥105,000 | 00254-000539 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 円型・カバー・プッシュ3点セット  | BPZ-700-63C | ¥119,350 | ¥108,500 | 00254-000540 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 円型・プッシュ2点セット       | BPZ-700-72  | ¥115,500 | ¥105,000 | 00254-000543 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 円型・カバー・プッシュ3点セット   | BPZ-700-73C | ¥119,350 | ¥108,500 | 00254-000544 |

## 角型手すり

ポールからの出幅を抑えつつ、縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込んで使える横向きに組換え可能な手すりです。



### 使用手順

1



角型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕を持って座ります。

2




手すりをつかみ、前方へ引き込むように、上半身を前傾させていきます。

3



身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

4

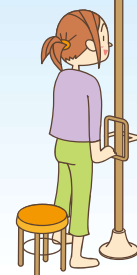

手すりをつかんだまま上半身をプッシュアップし、膝を伸ばし立位をとります。

### 角型手すり単品価格

| 品名      | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------|------------|---------|---------|--------------|
| 角型手すり単品 | BPE-300-30 | ¥27,500 | ¥25,000 | 00254-000132 |

### 角型手すりセット価格

| 品名                                    | 品番          | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 角型 セット            | BPZ-750-10  | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000545 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 角型 クッションカバー付き セット | BPZ-750-10C | ¥86,350 | ¥78,500 | 00254-000546 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 角型 セット             | BPZ-750-20  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000547 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 角型 クッションカバー付き セット  | BPZ-750-20C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000548 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 角型 セット              | BPZ-750-30  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000549 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 角型 クッションカバー付き セット   | BPZ-750-30C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000550 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 角型 セット            | BPZ-750-50  | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000551 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 角型 クッションカバー付き セット | BPZ-750-50C | ¥86,350 | ¥78,500 | 00254-000552 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 角型 セット             | BPZ-750-60  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000553 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 角型 クッションカバー付き セット  | BPZ-750-60C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000554 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 角型 セット              | BPZ-750-70  | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000555 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 角型 クッションカバー付き セット   | BPZ-750-70C | ¥88,550 | ¥80,500 | 00254-000556 |

ウェーブ型手すり

グリップ部をウェーブ状にすることで、握り込みやすく滑りにくい手すりです。  
立ち座りや、段差の昇降などの動きをサポートします。  
350と600の2種類長さがあります。


ウェーブ型手すり



ウェーブ型手すりロング




標準  
サイズ

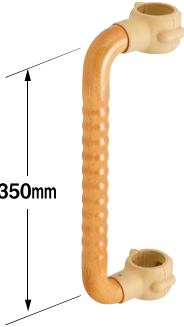



350mm

ロング  
サイズ

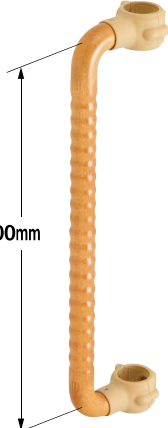

600mm

グリップ茶  
グリップ緑

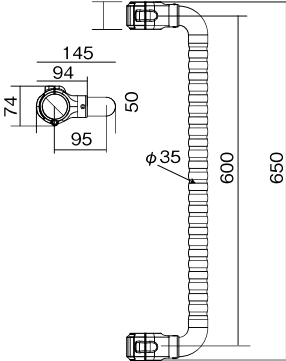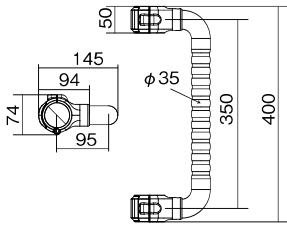

ウェーブ型手すり単品価格

| 品名            | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|---------------|------------|---------|---------|--------------|
| ウェーブ型手すり単品    | BPE-300-10 | ¥14,300 | ¥13,000 | 00254-000130 |
| ウェーブ型手すりロング単品 | BPE-300-40 | ¥15,400 | ¥14,000 | 00254-000133 |


ウェーブ型手すりセット価格

| 品名                                       | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型 セット            | BPZ-500-10 | ¥69,300 | ¥63,000 | 00254-000446 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット         | BPZ-500-11 | ¥70,400 | ¥64,000 | 00254-000447 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート ウェーブ型 セット             | BPZ-500-20 | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000448 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート ウェーブ型ロングセット           | BPZ-500-21 | ¥72,600 | ¥66,000 | 00254-000449 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング ウェーブ型 セット              | BPZ-500-30 | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000450 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロングセット            | BPZ-500-31 | ¥72,600 | ¥66,000 | 00254-000451 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー ウェーブ型 セット            | BPZ-500-50 | ¥69,300 | ¥63,000 | 00254-000452 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロングセット          | BPZ-500-51 | ¥70,400 | ¥64,000 | 00254-000453 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート ウェーブ型 セット             | BPZ-500-60 | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000454 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート ウェーブ型ロングセット           | BPZ-500-61 | ¥72,600 | ¥66,000 | 00254-000455 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング ウェーブ型 セット              | BPZ-500-70 | ¥71,500 | ¥65,000 | 00254-000456 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング ウェーブ型ロングセット            | BPZ-500-71 | ¥72,600 | ¥66,000 | 00254-000457 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き | BPZ-500-14 | ¥70,950 | ¥64,500 | 00254-000845 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き | BPZ-500-15 | ¥70,950 | ¥64,500 | 00254-000846 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き   | BPZ-500-34 | ¥73,150 | ¥66,500 | 00254-000847 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き   | BPZ-500-35 | ¥73,150 | ¥66,500 | 00254-000848 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き | BPZ-500-54 | ¥70,950 | ¥64,500 | 00254-000849 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き | BPZ-500-55 | ¥70,950 | ¥64,500 | 00254-000850 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング セット グリップ茶付き   | BPZ-500-74 | ¥73,150 | ¥66,500 | 00254-000851 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング ウェーブ型ロング セット グリップ緑付き   | BPZ-500-75 | ¥73,150 | ¥66,500 | 00254-000852 |


## 玄関アーム

玄関等段差のあるところにスペースを有効に使える、出幅のコンパクトな手すりです。  
特殊なシリコン滑止めを使用していることで、横ズレに強い耐性があります。  
高位差のある段差では、横向きに降りることによって膝にかかる負担をより軽減することが可能です。

### 玄関アーム レギュラー

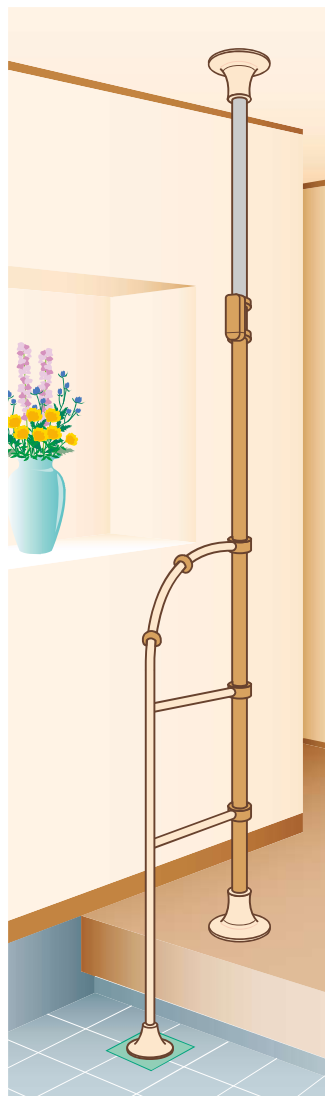

T型天井ベースも  
選べます

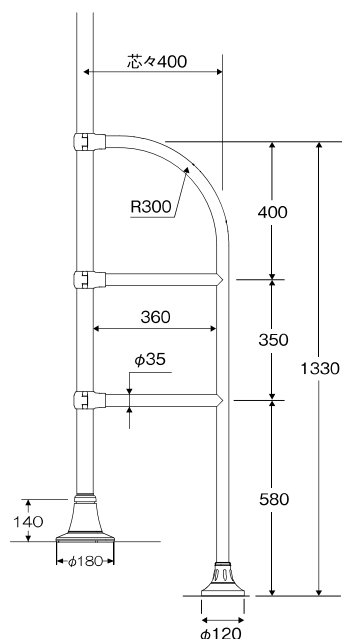

#### 玄関アームレギュラー単品価格

| 品名          | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-------------|------------|---------|---------|--------------|
| 玄関アーム RE 単品 | BPE-500-10 | ¥47,300 | ¥43,000 | 00254-000360 |

#### 玄関アームレギュラーセット価格

| 品名                               | 品番         | 価格(税込)   | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------------------------|------------|----------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 玄関アーム RE セット | BPZ-800-10 | ¥102,300 | ¥93,000 | 00254-000557 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 玄関アーム RE セット  | BPZ-800-20 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000558 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 玄関アーム RE セット   | BPZ-800-30 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000559 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 玄関アーム RE セット | BPZ-800-50 | ¥102,300 | ¥93,000 | 00254-000560 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 玄関アーム RE セット  | BPZ-800-60 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000561 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 玄関アーム RE セット   | BPZ-800-70 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000562 |



#### 耐水玄関アームレギュラーセット価格

| 品名                                  | 品番         | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|-------------------------------------|------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 玄関アーム RE セット | BPZ-850-10 | ¥107,800 | ¥98,000  | 00254-000569 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 玄関アーム RE セット  | BPZ-850-20 | ¥110,000 | ¥100,000 | 00254-000570 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 玄関アーム RE セット   | BPZ-850-30 | ¥110,000 | ¥100,000 | 00254-000571 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー 耐水 玄関アーム RE セット | BPZ-850-50 | ¥107,800 | ¥98,000  | 00254-000572 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート 耐水 玄関アーム RE セット  | BPZ-850-60 | ¥110,000 | ¥100,000 | 00254-000573 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング 耐水 玄関アーム RE セット   | BPZ-850-70 | ¥110,000 | ¥100,000 | 00254-000574 |

# 玄関アーム

玄関等段差のあるところにスペースを有効に使える、出幅のコンパクトな手すりです。  
特殊なシリコン滑止めを使用していることで、横ズレに強い耐性があります。  
高位差のある段差では、横向きに降りることで膝にかかる負担をより軽減することが可能です。

## 玄関アーム ショート

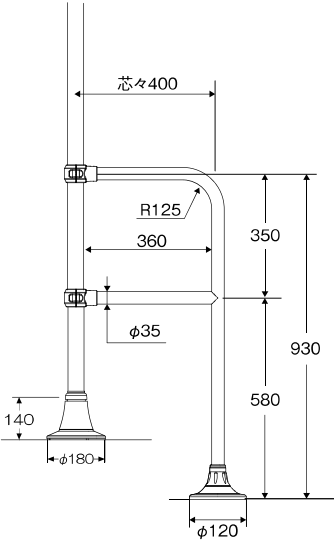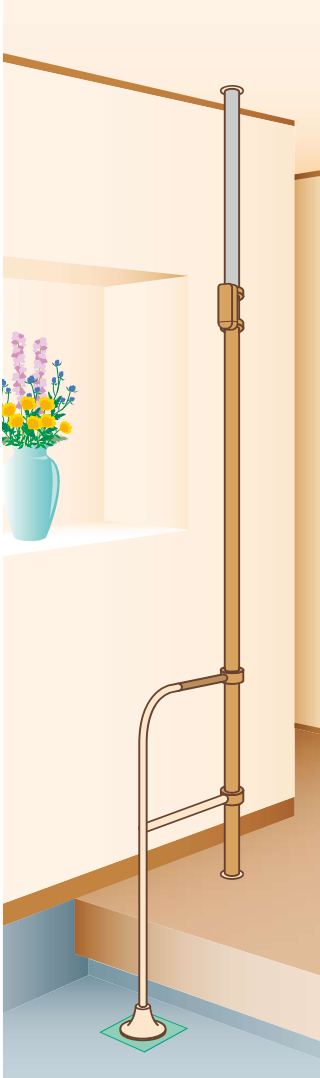

T型天井ベースも  
選べます

手すりカバー

シリコン  
滑り止めシート

玄関アーム

手すりカバー

シリコン  
滑り止めシート

玄関アームショート単品価格

| 品名          | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-------------|------------|---------|---------|--------------|
| 玄関アーム SH 単品 | BPE-500-20 | ¥41,800 | ¥38,000 | 00254-000361 |

### 玄関アームショートセット価格

| 品名                                | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 玄関アーム SH セット  | BPZ-810-10 | ¥96,800 | ¥88,000 | 00254-000563 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 玄関アーム SH セット   | BPZ-810-20 | ¥99,000 | ¥90,000 | 00254-000564 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 玄関アーム SH セット    | BPZ-810-30 | ¥99,000 | ¥90,000 | 00254-000565 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー 玄関アーム SH セット | BPZ-810-50 | ¥96,800 | ¥88,000 | 00254-000566 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート 玄関アーム SH セット  | BPZ-810-60 | ¥99,000 | ¥90,000 | 00254-000567 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング 玄関アーム SH セット   | BPZ-810-70 | ¥99,000 | ¥90,000 | 00254-000568 |

### 耐水玄関アームショートセット価格

| 品名                                   | 品番         | 価格(税込)   | 価格(税別)  | TAIS         |
|--------------------------------------|------------|----------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 玄関アーム SH セット  | BPZ-860-10 | ¥102,300 | ¥93,000 | 00254-000575 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 玄関アーム SH セット   | BPZ-860-20 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000576 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 玄関アーム SH セット    | BPZ-860-30 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000577 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー 耐水 玄関アーム SH セット | BPZ-860-50 | ¥102,300 | ¥93,000 | 00254-000578 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート 耐水 玄関アーム SH セット  | BPZ-860-60 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000579 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング 耐水 玄関アーム SH セット   | BPZ-860-70 | ¥104,500 | ¥95,000 | 00254-000580 |

## グリップアーム

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。トイレや玄関ポーチ・ベランダなどに有効です。ショートタイプの 3P・ロングタイプの 5P・傾斜タイプの 5P 斜があります。



3Pセット  
丸型天井ベース





3Pセット  
T型天井ベース





3P

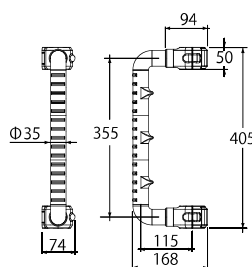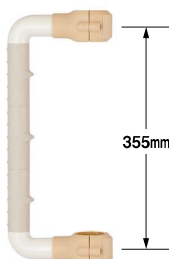

5P

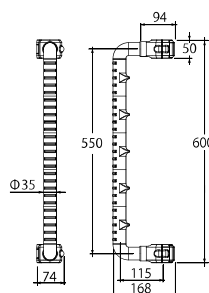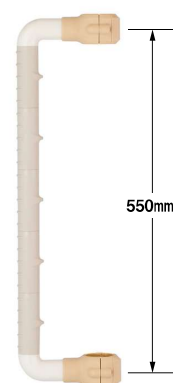

5P斜

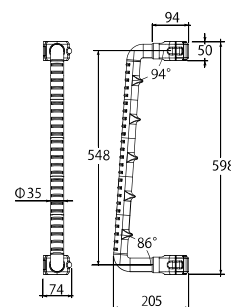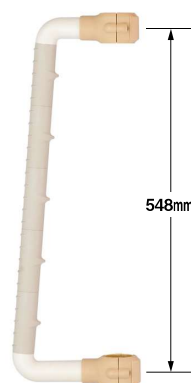

グリップアーム単品価格

| 品名             | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------|------------|---------|---------|--------------|
| グリップアーム 3P 単品  | BPE-300-70 | ¥19,800 | ¥18,000 | 00254-000144 |
| グリップアーム 5P 単品  | BPE-300-60 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000143 |
| グリップアーム 5P 斜単品 | BPE-300-50 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000142 |

グリップアームセット価格







| 品名                                     | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム -e 3P セット  | BPZ-510-10 | ¥74,800 | ¥68,000 | 00254-000458 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート グリップアーム -e 3P セット   | BPZ-510-20 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000459 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング グリップアーム -e 3P セット    | BPZ-510-30 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000460 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー グリップアーム -e 3P セット  | BPZ-510-50 | ¥74,800 | ¥68,000 | 00254-000461 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート グリップアーム -e 3P セット   | BPZ-510-60 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000462 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング グリップアーム -e 3P セット    | BPZ-510-70 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000463 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム -e 5P セット  | BPZ-511-10 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000464 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート グリップアーム -e 5P セット   | BPZ-511-20 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000465 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング グリップアーム -e 5P セット    | BPZ-511-30 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000466 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー グリップアーム -e 5P セット  | BPZ-511-50 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000467 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート グリップアーム -e 5P セット   | BPZ-511-60 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000468 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング グリップアーム -e 5P セット    | BPZ-511-70 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000469 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー グリップアーム -e 5P 斜セット | BPZ-512-10 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000470 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート グリップアーム -e 5P 斜セット  | BPZ-512-20 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000471 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング グリップアーム -e 5P 斜セット   | BPZ-512-30 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000472 |
| ベスポジ BPZ Tベース レギュラー グリップアーム -e 5P 斜セット | BPZ-512-50 | ¥77,000 | ¥70,000 | 00254-000473 |
| ベスポジ BPZ Tベース ショート グリップアーム -e 5P 斜セット  | BPZ-512-60 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000474 |
| ベスポジ BPZ Tベース ロング グリップアーム -e 5P 斜セット   | BPZ-512-70 | ¥79,200 | ¥72,000 | 00254-000475 |



## グリップアーム（耐水）

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。トイレや玄関ポーチ・ベランダなどに有効です。ショートタイプの 3P・ロングタイプの 5P・傾斜タイプの 5P 斜があります。

基本セット 耐水  
丸型天井ベース

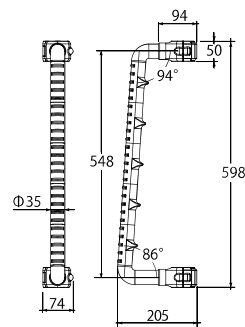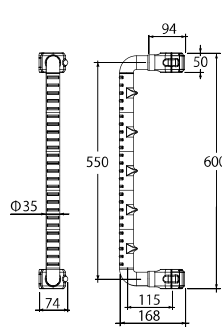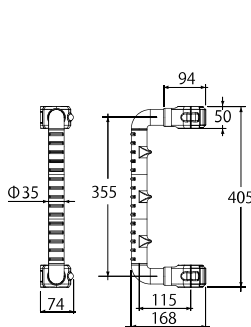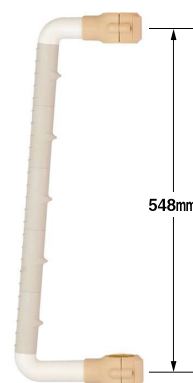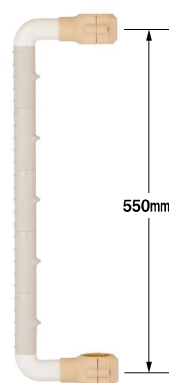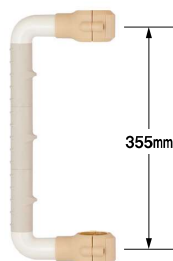

### グリップアーム単品価格

| 品名             | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|----------------|------------|---------|---------|--------------|
| グリップアーム 3P 単品  | BPE-300-70 | ¥19,800 | ¥18,000 | 00254-000144 |
| グリップアーム 5P 単品  | BPE-300-60 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000143 |
| グリップアーム 5P 斜単品 | BPE-300-50 | ¥22,000 | ¥20,000 | 00254-000142 |

### グリップアーム（耐水）セット価格

| 品名                                        | 品番         | 価格(税込)  | 価格(税別)  | TAIS         |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム -e 3P セット  | BPZ-515-10 | ¥80,300 | ¥73,000 | 00254-000476 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム -e 3P セット   | BPZ-515-20 | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000477 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム -e 3P セット    | BPZ-515-30 | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000478 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム -e 5P セット  | BPZ-516-10 | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000479 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム -e 5P セット   | BPZ-516-20 | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000480 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム -e 5P セット    | BPZ-516-30 | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000481 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 グリップアーム -e 5P 斜セット | BPZ-517-10 | ¥82,500 | ¥75,000 | 00254-000482 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 グリップアーム -e 5P 斜セット  | BPZ-517-20 | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000483 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 グリップアーム -e 5P 斜セット   | BPZ-517-30 | ¥84,700 | ¥77,000 | 00254-000484 |

H 型 - 固定

ベスポジ BPZ 基本セットをストレートに連結した手すりです。壁や家具にとらわれず、自由に設置することができます。  
H 型セットは連結の基本になるセットで、これを延長したり他のブラケットを使用したりして個別の様々な状況に対応できるようになります。



H 型木手すり固定セット価格

| 品名                                      | 品番           | 価格 (税込)  | 価格 (税別)  | TAIS         |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり固定 600 セット   | BPZ-H2000-10 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000581 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり固定 900 セット   | BPZ-H2000-11 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000582 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり固定 1200 セット  | BPZ-H2000-12 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000583 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり固定 600 セット    | BPZ-H2000-20 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000584 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり固定 900 セット    | BPZ-H2000-21 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000585 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり固定 1200 セット   | BPZ-H2000-22 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000586 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり固定 600 セット     | BPZ-H2000-30 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000587 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり固定 900 セット     | BPZ-H2000-31 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000588 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり固定 1200 セット    | BPZ-H2000-32 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000589 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり固定 600 セット  | BPZ-H2000-50 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000590 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり固定 900 セット  | BPZ-H2000-51 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000591 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり固定 1200 セット | BPZ-H2000-52 | ¥126,500 | ¥115,000 | 00254-000592 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり固定 600 セット   | BPZ-H2000-60 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000593 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり固定 900 セット   | BPZ-H2000-61 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000594 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり固定 1200 セット  | BPZ-H2000-62 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000595 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり固定 600 セット    | BPZ-H2000-70 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000596 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり固定 900 セット    | BPZ-H2000-71 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000597 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり固定 1200 セット   | BPZ-H2000-72 | ¥130,900 | ¥119,000 | 00254-000598 |

H 型 - 曲げ

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。  
 横曲げに組替えることで、オフセット型や出端や入端にも対応できます。



POINT

用途に合わせて曲げ  
方向を変更できます

●階段等の段差のある場所

横傾斜

●廊下の曲がり角 ●部屋内の角 など

H 型木手すり曲げセット価格

| 品名                                        | 品番           | 価格 (税込)  | 価格 (税別)  | TAIS         |
|-------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベース ポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 600 セット   | BPZ-H2100-10 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000599 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 900 セット   | BPZ-H2100-11 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000600 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 1200 セット  | BPZ-H2100-12 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000601 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり曲げ 600 セット    | BPZ-H2100-20 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000602 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり曲げ 900 セット    | BPZ-H2100-21 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000603 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり曲げ 1200 セット   | BPZ-H2100-22 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000604 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり曲げ 600 セット     | BPZ-H2100-30 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000605 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり曲げ 900 セット     | BPZ-H2100-31 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000606 |
| ベース ポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり曲げ 1200 セット    | BPZ-H2100-32 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000607 |
| ベース ポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 600 セット  | BPZ-H2100-50 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000608 |
| ベース ポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 900 セット  | BPZ-H2100-51 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000609 |
| ベース ポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり曲げ 1200 セット | BPZ-H2100-52 | ¥128,040 | ¥116,400 | 00254-000610 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり曲げ 600 セット   | BPZ-H2100-60 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000611 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり曲げ 900 セット   | BPZ-H2100-61 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000612 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり曲げ 1200 セット  | BPZ-H2100-62 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000613 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり曲げ 600 セット    | BPZ-H2100-70 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000614 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり曲げ 900 セット    | BPZ-H2100-71 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000615 |
| ベース ポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり曲げ 1200 セット   | BPZ-H2100-72 | ¥132,440 | ¥120,400 | 00254-000616 |

H 型 - 跳ね上げ

ベスポジBPZ 基本セットをつなぐ手すりです。手すりが跳ね上がることで、扉の前など、通行の制限を緩和できます。手すりは、跳ね上げ時には軽く、下すときには抵抗がかかる安全仕様です。



POINT トルク機能



ヒンジ部は上げる時は軽く、下げる時は抵抗が増し、重く動作する為、上げた後に手すりが落ちてくる心配がありません。

付属 手すりホルダー

取り外した手すりを基本ポールに固定する為のホルダー。




H 型手すり跳ね上げセット価格

| 品名                                      | 品番           | 価格 (税込)  | 価格 (税別)  | TAIS         |
|-----------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 600 セット   | BPZ-H2200-10 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000617 |
| ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 900 セット   | BPZ-H2200-11 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000618 |
| ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 1200 セット  | BPZ-H2200-12 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000619 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 600 セット    | BPZ-H2200-20 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000620 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 900 セット    | BPZ-H2200-21 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000621 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 1200 セット   | BPZ-H2200-22 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000622 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 600 セット     | BPZ-H2200-30 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000623 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 900 セット     | BPZ-H2200-31 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000624 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 1200 セット    | BPZ-H2200-32 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000625 |
| ベスポジBPZ T ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 600 セット  | BPZ-H2200-50 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000626 |
| ベスポジBPZ T ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 900 セット  | BPZ-H2200-51 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000627 |
| ベスポジBPZ T ベース レギュラー H 型手すり跳ね上げ 1200 セット | BPZ-H2200-52 | ¥143,000 | ¥130,000 | 00254-000628 |
| ベスポジBPZ T ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 600 セット   | BPZ-H2200-60 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000629 |
| ベスポジBPZ T ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 900 セット   | BPZ-H2200-61 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000630 |
| ベスポジBPZ T ベース ショート H 型手すり跳ね上げ 1200 セット  | BPZ-H2200-62 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000631 |
| ベスポジBPZ T ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 600 セット    | BPZ-H2200-70 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000632 |
| ベスポジBPZ T ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 900 セット    | BPZ-H2200-71 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000633 |
| ベスポジBPZ T ベース ロング H 型手すり跳ね上げ 1200 セット   | BPZ-H2200-72 | ¥147,400 | ¥134,000 | 00254-000634 |

## H 型 - 取り外し

手すりを取り外すことができる連結手すりです。  
押入れや屋内外をつなぐ時などに有効です。

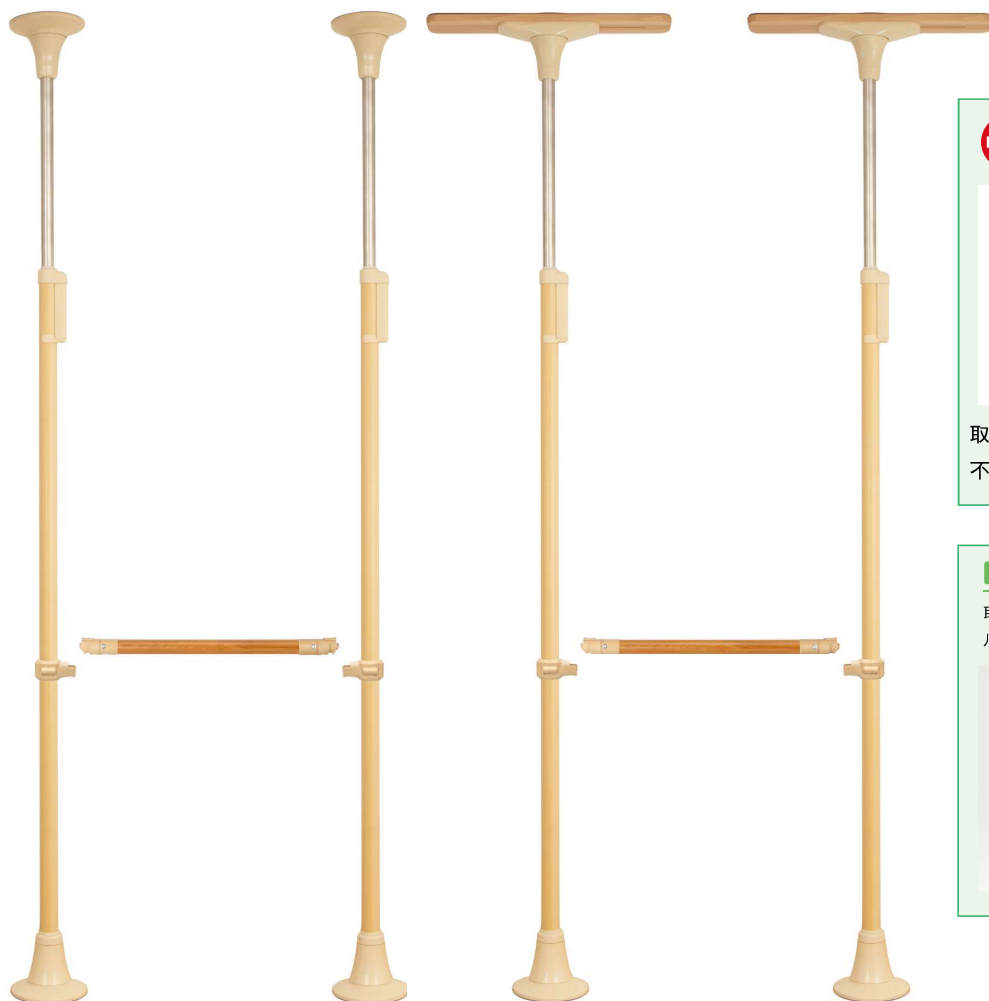

### POINT 取り外し機能



取り外しができるブラケットがついており、  
不要なときは手すりを取り外せます。

### 付属 手すりホルダー

取り外した手すりを基本ポールに固定する為のホルダー。





### H 型木手すり取り外しセット価格

| 品名                                        | 品番           | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|-------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 600 セット   | BPZ-H2300-10 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000635 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 900 セット   | BPZ-H2300-11 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000636 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 1200 セット  | BPZ-H2300-12 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000637 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり取り外し 600 セット    | BPZ-H2300-20 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000638 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり取り外し 900 セット    | BPZ-H2300-21 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000639 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型木手すり取り外し 1200 セット   | BPZ-H2300-22 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000640 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり取り外し 600 セット     | BPZ-H2300-30 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000641 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり取り外し 900 セット     | BPZ-H2300-31 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000642 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型木手すり取り外し 1200 セット    | BPZ-H2300-32 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000643 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 600 セット  | BPZ-H2300-50 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000644 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 900 セット  | BPZ-H2300-51 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000645 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型木手すり取り外し 1200 セット | BPZ-H2300-52 | ¥129,800 | ¥118,000 | 00254-000646 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり取り外し 600 セット   | BPZ-H2300-60 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000647 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり取り外し 900 セット   | BPZ-H2300-61 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000648 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型木手すり取り外し 1200 セット  | BPZ-H2300-62 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000649 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり取り外し 600 セット    | BPZ-H2300-70 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000650 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり取り外し 900 セット    | BPZ-H2300-71 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000651 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型木手すり取り外し 1200 セット   | BPZ-H2300-72 | ¥134,200 | ¥122,000 | 00254-000652 |


## H 型 - 伸縮・固定

ベスポジ BPZ 基本セットをストレートに連結した手すりです。  
壁にとらわれない手すりすることで、目的に最適な動線をつくる事が出来ます。  
伸縮手すりで間隔の調整も容易です。

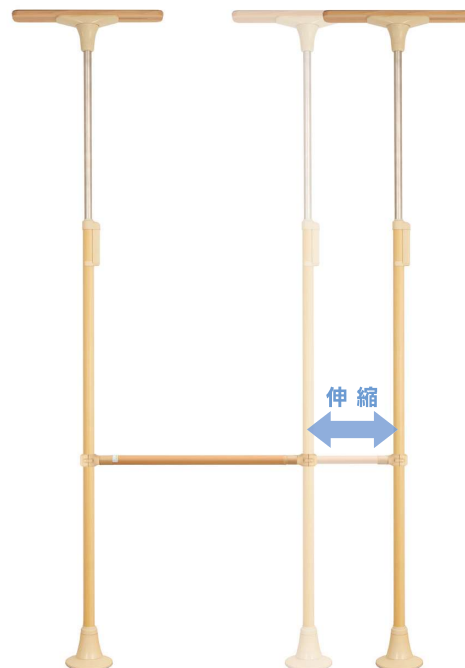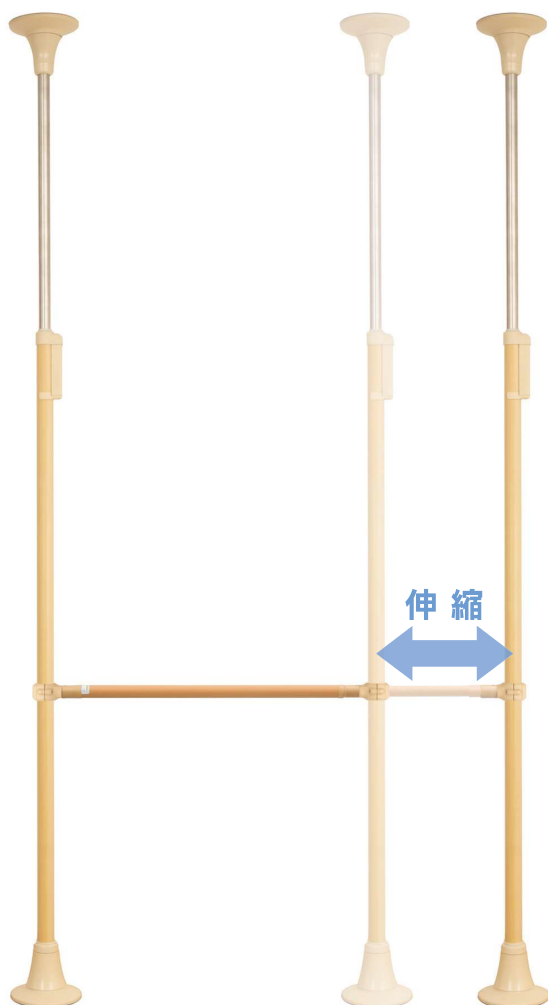


● 下記のような場合に伸縮手すりであれば再設置が容易です。

竿天井に天井ベースがうまく当たらない時の位置調整。

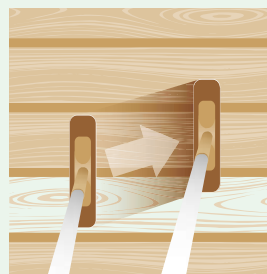

ポータブルトイレからトイレ利用へのADL向上などのレイアウト変更。

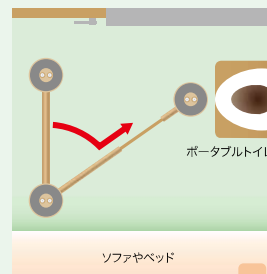


### H 型伸縮手すり固定セット価格

| 品名                                           | 品番           | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|----------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 600-900 セット    | BPZ-H2500-10 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000654 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 900-1200 セット   | BPZ-H2500-11 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000655 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット  | BPZ-H2500-12 | ¥146,300 | ¥133,000 | 00254-000656 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型 伸縮・固定 600-900 セット     | BPZ-H2500-20 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000657 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型 伸縮・固定 900-1200 セット    | BPZ-H2500-21 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000658 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット   | BPZ-H2500-22 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000659 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型 伸縮・固定 600-900 セット      | BPZ-H2500-30 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000660 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型 伸縮・固定 900-1200 セット     | BPZ-H2500-31 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000661 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット    | BPZ-H2500-32 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000662 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 600-900 セット   | BPZ-H2500-50 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000663 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 900-1200 セット  | BPZ-H2500-51 | ¥139,700 | ¥127,000 | 00254-000664 |
| ベスポジ BPZ T ベース レギュラー H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2500-52 | ¥146,300 | ¥133,000 | 00254-000665 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型 伸縮・固定 600-900 セット    | BPZ-H2500-60 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000666 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型 伸縮・固定 900-1200 セット   | BPZ-H2500-61 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000667 |
| ベスポジ BPZ T ベース ショート H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット  | BPZ-H2500-62 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000668 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型 伸縮・固定 600-900 セット     | BPZ-H2500-70 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000669 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型 伸縮・固定 900-1200 セット    | BPZ-H2500-71 | ¥144,100 | ¥131,000 | 00254-000670 |
| ベスポジ BPZ T ベース ロング H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット   | BPZ-H2500-72 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000671 |


H 型 - 伸縮・固定（耐水）

ベスポジ BPZ 基本セットをストレートに連結した手すりです。  
 壁にとられない手すりにする事で、目的に最適な動線をつくる事が出来ます。  
 伸縮手すりで間隔の調整も容易です。

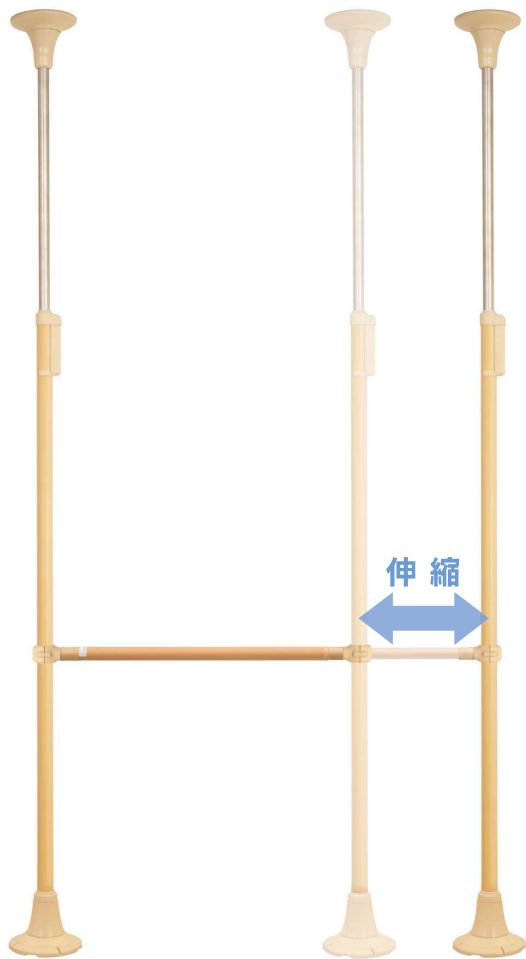


簡単調整・無段階調整・ロック機能

3種類の長さをご用意しました

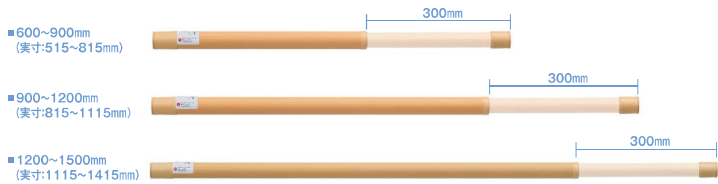


- ◆30cmの伸縮幅で容易に調整が可能です。
- ◆伸縮は無段階で必要な長さだけ調整が可能です。
- （注意：伸縮幅30cm以内）

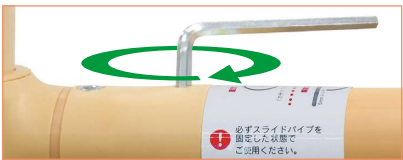

◆伸縮の固定は、六角レンチ1本で可能です。緩める際は左回りで緩め、ロックは右回りでクリック音が鳴るまで回せば固定ができます。

- 下記のような場合に伸縮手すりであれば再設置が容易です。

ポータブルトイレからトイレ利用へのADL向上などのレイアウト変更。

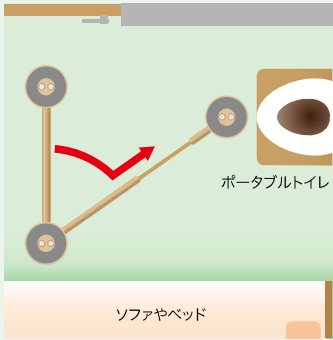

H 型伸縮手すり固定（耐水）セット価格

| 品名                                             | 品番           | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H 型 伸縮・固定 600-900 セット   | BPZ-H2700-10 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000684 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H 型 伸縮・固定 900-1200 セット  | BPZ-H2700-11 | ¥150,700 | ¥137,000 | 00254-000685 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット | BPZ-H2700-12 | ¥157,300 | ¥143,000 | 00254-000686 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 H 型 伸縮・固定 600-900 セット    | BPZ-H2700-20 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000687 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 H 型 伸縮・固定 900-1200 セット   | BPZ-H2700-21 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000688 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット  | BPZ-H2700-22 | ¥161,700 | ¥147,000 | 00254-000689 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 H 型 伸縮・固定 600-900 セット     | BPZ-H2700-30 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000690 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 H 型 伸縮・固定 900-1200 セット    | BPZ-H2700-31 | ¥155,100 | ¥141,000 | 00254-000691 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 H 型 伸縮・固定 1200-1500 セット   | BPZ-H2700-32 | ¥161,700 | ¥147,000 | 00254-000692 |




## H 型 - 伸縮・曲げ

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。横曲げに組換えることで、オフセット型や出端・入端などのコーナー部にも対応できます。伸縮手すりと組み合わせることで、段差の間隔や、角度の変更による長さ変更も容易です。



手すりの勾配を緩くする為位置を少しずらしたい時や、框に踏み台を増やして手すりの位値を移動させたい時。

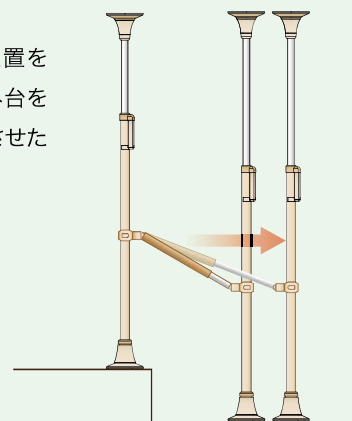

H 型伸縮手すり曲げセット価格


| 品名                                        | 品番           | 価格(税込)   | 価格(税別)   | TAIS         |
|-------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット  | BPZ-H2600-10 | ¥141,240 | ¥128,400 | 00254-000672 |
| ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット | BPZ-H2600-11 | ¥141,240 | ¥128,400 | 00254-000673 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ショート H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット   | BPZ-H2600-20 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000674 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ショート H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット  | BPZ-H2600-21 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000675 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ロング H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット    | BPZ-H2600-30 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000676 |
| ベスポジBPZ 丸ベース ロング H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット   | BPZ-H2600-31 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000677 |
| ベスポジBPZ Tベース レギュラー H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット  | BPZ-H2600-50 | ¥141,240 | ¥128,400 | 00254-000678 |
| ベスポジBPZ Tベース レギュラー H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット | BPZ-H2600-51 | ¥141,240 | ¥128,400 | 00254-000679 |
| ベスポジBPZ Tベース ショート H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット   | BPZ-H2600-60 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000680 |
| ベスポジBPZ Tベース ショート H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット  | BPZ-H2600-61 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000681 |
| ベスポジBPZ Tベース ロング H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット    | BPZ-H2600-70 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000682 |
| ベスポジBPZ Tベース ロング H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット   | BPZ-H2600-71 | ¥145,640 | ¥132,400 | 00254-000683 |

H 型 - 伸縮・曲げ（耐水）

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。横曲げに組換えることで、オフセット型や出端・入端などのコーナー部にも対応できます。伸縮手すりと組み合わせることで、段差の間隔や、角度の変更による長さ変更も容易です。

簡単調整・無段階調整・ロック機能

2種類の長さをご用意しました

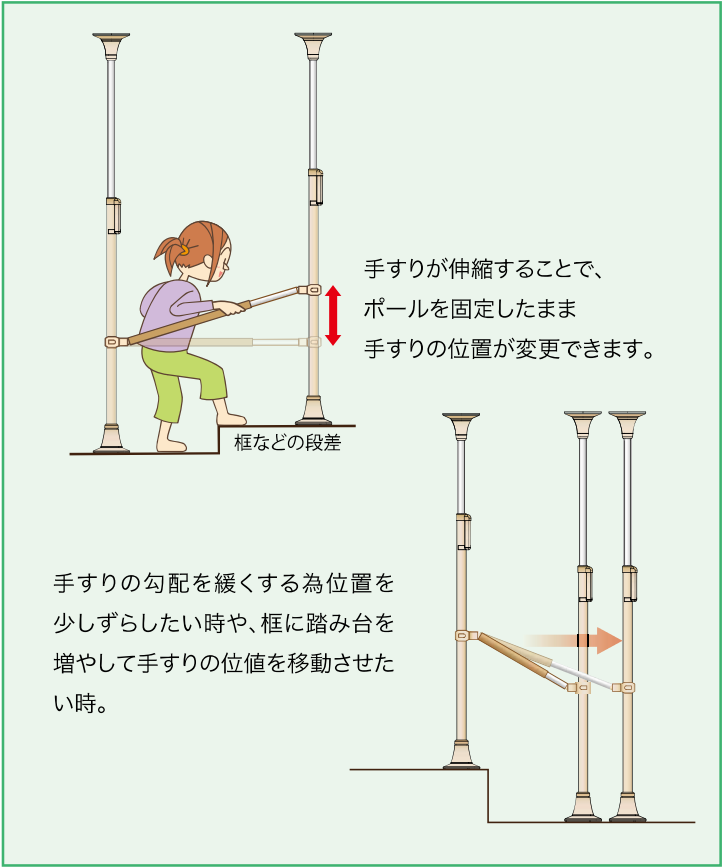

H 型伸縮手すり曲げ（耐水）セット価格

| 品名                                            | 品番           | 価格 (税込)  | 価格 (税別)  | TAIS         |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット  | BPZ-H2800-10 | ¥152,240 | ¥138,400 | 00254-000693 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース レギュラー 耐水 H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット | BPZ-H2800-11 | ¥152,240 | ¥138,400 | 00254-000694 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット   | BPZ-H2800-20 | ¥156,640 | ¥142,400 | 00254-000695 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ショート 耐水 H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット  | BPZ-H2800-21 | ¥156,640 | ¥142,400 | 00254-000696 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 H 型 伸縮・曲げ 600-900 セット    | BPZ-H2800-30 | ¥156,640 | ¥142,400 | 00254-000697 |
| ベスポジ BPZ 丸ベース ロング 耐水 H 型 伸縮・曲げ 900-1200 セット   | BPZ-H2800-31 | ¥156,640 | ¥142,400 | 00254-000698 |

# 手すりセット

基本セットに取り付けて使用する手すりのセットです。

## 伸縮手すり

■ 600~900mm (実寸:515~815mm)



■ 900~1200mm (実寸:815~1115mm)



■ 1200~1500mm (実寸:1115~1415mm)



メーカー希望  
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

|            | 品 番         |
|------------|-------------|
| 600~900mm  | SBR-600-609 |
| 900~1200mm | SBR-600-912 |

メーカー希望  
小売価格 **¥28,600** (税込)

本体価格 **¥26,000**

|             | 品 番          |
|-------------|--------------|
| 1200~1500mm | BPZ-900-1215 |

## システム伸縮手すり固定セット

■ 600~900mm (芯々:600~900mm)



■ 900~1200mm (芯々:900~1200mm)



■ 1200~1500mm (芯々:1200~1500mm)



メーカー希望  
小売価格 **¥29,700** (税込)

本体価格 **¥27,000**

|            | 品 番        | TAISコード      |
|------------|------------|--------------|
| 600~900mm  | SBR-30-609 | 00254-000169 |
| 900~1200mm | SBR-30-912 | 00254-000170 |

メーカー希望  
小売価格 **¥36,300** (税込)

本体価格 **¥33,000**

|             | 品 番     | TAISコード      |
|-------------|---------|--------------|
| 1200~1500mm | BPZ-900 | 00254-000653 |

## システム伸縮手すり曲げセット



■ 600~900mm  
(芯々:700~1000mm)

■ 900~1200mm  
(芯々:1000~1300mm)

メーカー希望  
小売価格 **¥31,240** (税込)

本体価格 **¥28,400**

|            | 品 番        | TAISコード      |
|------------|------------|--------------|
| 600~900mm  | SBR-40-609 | 00254-000171 |
| 900~1200mm | SBR-40-912 | 00254-000172 |

## システム木手すり 標準タイプ

■ 600mm (木部:460mm / 実寸:514mm)



■ 900mm (木部:760mm / 実寸:814mm)



■ 1200mm (木部:1060mm / 実寸:1114mm)



メーカー希望  
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

|        | 品 番         |
|--------|-------------|
| 600mm  | SBR-200-060 |
| 900mm  | SBR-200-090 |
| 1200mm | SBR-200-120 |

## システム木手すり 固定セット

■600mm (芯々:600mm)



■900mm (芯々:900mm)



■1200mm (芯々:1200mm)




メーカー希望  
小売価格 **¥16,500** (税込)

本体価格 **¥15,000**

|        | 品 番        | TAISコード      |
|--------|------------|--------------|
| 600mm  | SBR-10-060 | 00254-000113 |
| 900mm  | SBR-10-090 | 00254-000062 |
| 1200mm | SBR-10-120 | 00254-000117 |

## システム木手すり 曲げセット

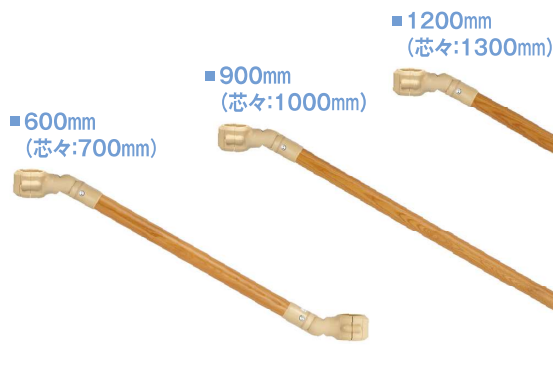

■900mm  
(芯々:1000mm)


■1200mm  
(芯々:1300mm)

メーカー希望  
小売価格 **¥18,040** (税込)

本体価格 **¥16,400**

|        | 品 番        | TAISコード      |
|--------|------------|--------------|
| 600mm  | SBR-20-060 | 00254-000114 |
| 900mm  | SBR-20-090 | 00254-000063 |
| 1200mm | SBR-20-120 | 00254-000118 |

## システム木手すり 跳ね上げセット

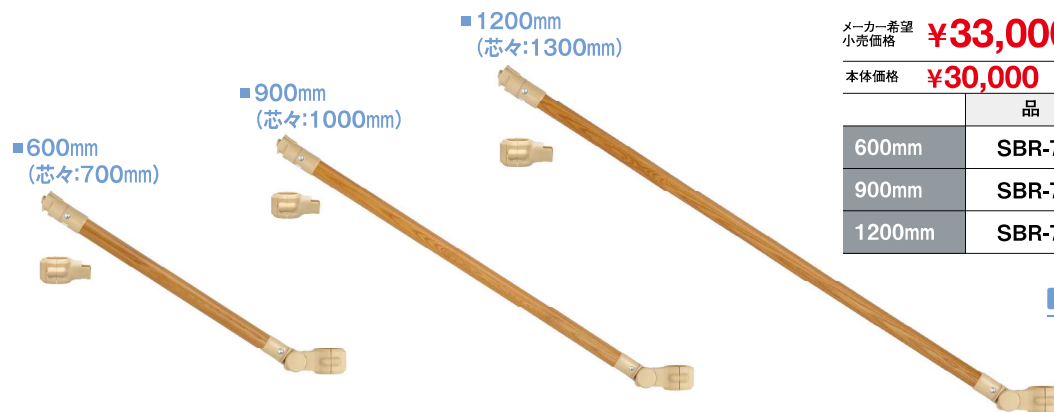

■900mm  
(芯々:1000mm)

■1200mm  
(芯々:1300mm)

メーカー希望  
小売価格 **¥33,000** (税込)

本体価格 **¥30,000**

|        | 品 番        | TAISコード      |
|--------|------------|--------------|
| 600mm  | SBR-70-060 | 00254-000115 |
| 900mm  | SBR-70-090 | 00254-000064 |
| 1200mm | SBR-70-120 | 00254-000119 |

付属 手すりホルダー



## システム木手すり 取り外しセット

■600mm (芯々:700mm)



■900mm (芯々:1000mm)



■1200mm (芯々:1300mm)



メーカー希望  
小売価格 **¥19,800** (税込)

本体価格 **¥18,000**

|        | 品 番        | TAISコード      |
|--------|------------|--------------|
| 600mm  | SBR-80-060 | 00254-000116 |
| 900mm  | SBR-80-090 | 00254-000065 |
| 1200mm | SBR-80-120 | 00254-000120 |

付属 手すりホルダー



# ブラケット類

基本セットとブラケット・オプションの組み合わせで様々な状況に合ったご利用者様に必要な手すりが提供できます。



## システムエンドブラケット(直)

メーカー希望  
小売価格 **¥3,850** (税込)

本体価格 **¥3,500**

品 番

SBR-100-10

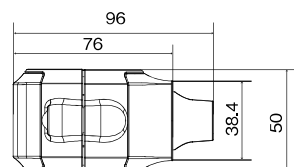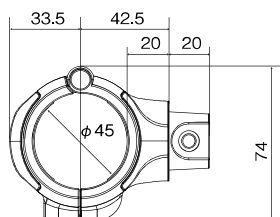



## システムエンドブラケット(曲げ)

メーカー希望  
小売価格 **¥4,620** (税込)

本体価格 **¥4,200**

品 番

SBR-100-20

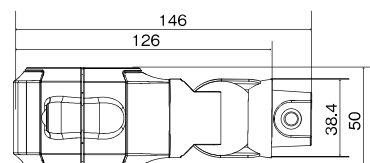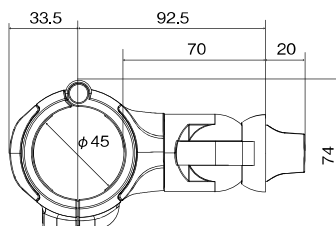



## システム接続ブラケット(直×直)

メーカー希望  
小売価格 **¥4,950** (税込)

本体価格 **¥4,500**

品 番

SBR-100-30

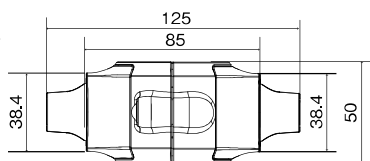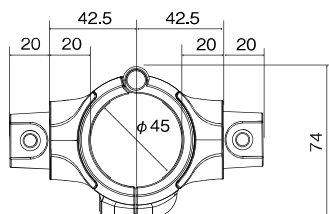



## システム接続ブラケット(直×曲げ)

メーカー希望  
小売価格 **¥5,720** (税込)

本体価格 **¥5,200**

品 番

SBR-100-40

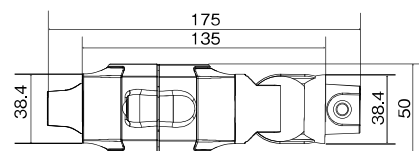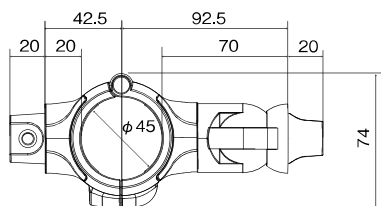



## システム接続ブラケット(曲げ×曲げ)

メーカー希望  
小売価格 **¥6,600** (税込)

本体価格 **¥6,000**

品 番

SBR-100-50

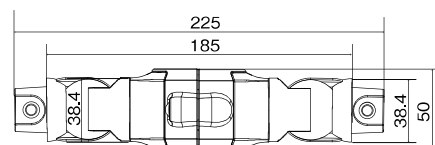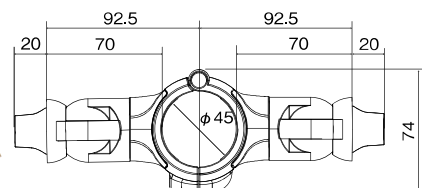

## システム跳ね上げ 回転部エンド付 / システム跳ね上げ 先端部エンド付


### システム跳ね上げ 回転部エンド付

メーカー希望  
小売価格 **¥19,250** (税込)

本体価格 **¥17,500**

品 番

SBR-100-71

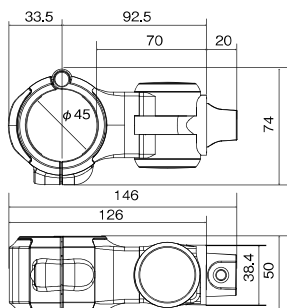


### システム跳ね上げ 先端部エンド付

メーカー希望  
小売価格 **¥6,050** (税込)

本体価格 **¥5,500**

品 番

SBR-100-72

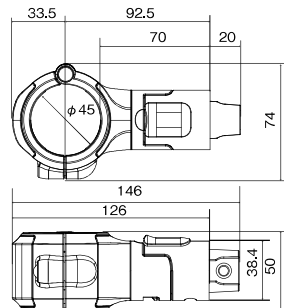

## システムブラケット 取り外しセット


メーカー希望  
小売価格 **¥11,000** (税込)

本体価格 **¥10,000**

品 番

SBR-100-80

### システム跳ね上げ 先端部エンド付と共通

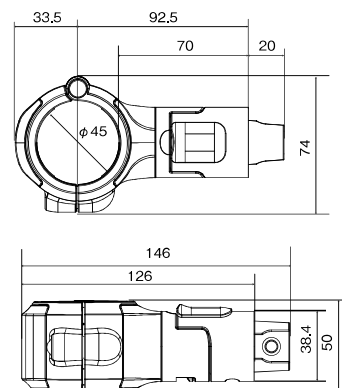


## システム接続ブラケット T型 オフセット

メーカー希望  
小売価格 **¥6,600** (税込)

本体価格 **¥6,000**

品 番

SBR-100-60

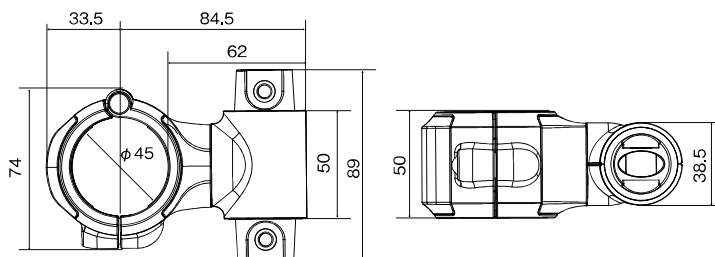

## BPZブラケット用クランプノブ

メーカー希望  
小売価格 **¥オープン** (税込)

品 番

BPZ-2000-10



設置初期のレイアウトを頻繁に変えて  
位置決めをするときなど作業性をあげる  
為のツール。





# 製品一覧表 メンテナンス用補修部品

## ■ BPZ 丸ベースセット



メーカー希望  
小売価格 **¥12,100** (税込)

本体価格 **¥11,000**

品 番 BPZ-100P-001

## ■ BPZ Tベースセット



メーカー希望  
小売価格 **¥17,600** (税込)

本体価格 **¥16,000**

品 番 BPZ-100P-005

## ■ BPZ 床ベースセット



メーカー希望  
小売価格 **¥12,100** (税込)

本体価格 **¥11,000**

品 番 BPZ-100P-002

## ■ 耐水ベース



※耐水ベース用  
滑り止め付き  
※セット販売のみ


メーカー希望  
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

品 番 BPE-100-90

※浴室での使用はできません。

## ■ BPZ 丸ベース用滑り止め

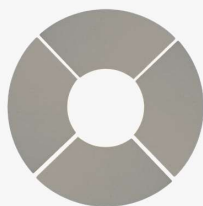

4枚

メーカー希望  
小売価格 **¥2,200** (税込)

本体価格 **¥2,000**

品 番 BPZ-100P-003

## ■ BPZ Tベース用プレート(滑り止め付き)



メーカー希望  
小売価格 **¥11,000** (税込)

本体価格 **¥10,000**

品 番 BPZ-100P-006

## ■ BPZ 耐水ベース用ジョイント



メーカー希望  
小売価格 **¥2,750** (税込)

本体価格 **¥2,500**

品 番 BPZ-100P-016

## ■ BPZ Tベース用滑り止め



メーカー希望  
小売価格 **¥4,400** (税込)

本体価格 **¥4,000**

品 番 BPZ-100P-007

## ■ BPZ Tベース用プレートロング(滑り止め付き)



メーカー希望  
小売価格 **¥16,500** (税込)

本体価格 **¥15,000**

品 番 BPZ-100P-008

## ■ BPZ Tベース用プレートロング用滑り止め



一台分2枚

メーカー希望  
小売価格 **¥9,900** (税込)

本体価格 **¥9,000**

品 番 BPZ-100P-009

## ■ BPZ 天井ベース用ネジキャップ



メーカー希望  
小売価格 **¥660** (税込)

本体価格 **¥600**

品 番 BPZ-100P-010

## ■ BPZ 床ベース用ネジキャップ



メーカー希望  
小売価格 **¥880** (税込)

本体価格 **¥800**

品 番 BPZ-100P-011

## ■ シリコン滑り止め



※160mm角(5枚セット)

メーカー希望  
小売価格 **¥11,000** (税込)

本体価格 **¥10,000**

品 番 ENT-300-25



## ■ BPZ バネ止めセット



|                |              |
|----------------|--------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥3,300(税込)   |
| 本体価格           | ¥3,000       |
| 品 番            | BPZ-100P-012 |

## ■ BPZ 赤ラインシール



※1Sheet

|                |              |
|----------------|--------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥2,200(税込)   |
| 本体価格           | ¥2,000       |
| 品 番            | BPZ-100P-013 |

## ■ ベスポジクッション



|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥3,850(税込) |
| 本体価格           | ¥3,500     |
| 品 番            | BPE-300-25 |

## ■ BPZ 日常点検シール



※1Sheet

|                |              |
|----------------|--------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥3,300(税込)   |
| 本体価格           | ¥3,000       |
| 品 番            | BPZ-100P-015 |

## ■ BPZ Tベース用ノブネジ



※2個

|                |              |
|----------------|--------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥1,100(税込)   |
| 本体価格           | ¥1,000       |
| 品 番            | BPZ-100P-004 |

## ■ 耐水ベース滑り止め



※4枚×2

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥5,500(税込) |
| 本体価格           | ¥5,000     |
| 品 番            | BPE-400-85 |

## ■ BPZ 垂直器



|                |              |
|----------------|--------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥2,200(税込)   |
| 本体価格           | ¥2,000       |
| 品 番            | BPZ-100P-014 |

## ■ ブラケット用ボルトM6×20



10個入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥2,750(税込) |
| 本体価格           | ¥2,500     |
| 品 番            | NBR-100-11 |

## ■ キャップボルトM6×20



20個入

※膝当て、肘置き、プッシュ手すりのクッションの固定に使用。

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥660(税込)   |
| 本体価格           | ¥600       |
| 品 番            | SBR-200-40 |

## ■ キャップボルトM6×12



20個入

※システム木手すりジョイント固定に使用  
※システム木手すり固定・システムブラケット固定に使用

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥550(税込)   |
| 本体価格           | ¥500       |
| 品 番            | SBR-200-10 |

## ■ 天井ベースキャップ



5個入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥1,650(税込) |
| 本体価格           | ¥1,500     |
| 品 番            | BPE-400-11 |

## ■ ジョイントリング



10個入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥3,300(税込) |
| 本体価格           | ¥3,000     |
| 品 番            | SBR-200-30 |

## ■ エンドキャップ



10個入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥1,650(税込) |
| 本体価格           | ¥1,500     |
| 品 番            | SBR-300-30 |

## ■ 手すりホルダー



2個入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥1,100(税込) |
| 本体価格           | ¥1,000     |
| 品 番            | SBR-100-75 |

## ■ システムブラケット滑り止め



10枚入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥2,750(税込) |
| 本体価格           | ¥2,500     |
| 品 番            | SBR-300-40 |

## ■ シングルブラケット滑り止め(小)



10枚入

|                |            |
|----------------|------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥3,300(税込) |
| 本体価格           | ¥3,000     |
| 品 番            | SBR-400-30 |

## ■ アーム用バッグ



|                |             |
|----------------|-------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥オープン(税込)   |
| 品 番            | BPZ-2100-10 |

## ■ ボール用バッグ



|                |             |
|----------------|-------------|
| メーカー希望<br>小売価格 | ¥オープン(税込)   |
| 品 番            | BPZ-2100-20 |

# マスカット ポールタイプII (浴槽用手すり)



基本セット

メーカー希望  
小売価格 **¥42,900** (税込)

本体価格 **¥39,000**

| 品 番    | TAISコード      |
|--------|--------------|
| MP2000 | 00254-000387 |



滑り止めセット

メーカー希望  
小売価格 **¥43,450** (税込)

本体価格 **¥39,500**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-100 | 00254-000388 |



グリップ白2個付き

メーカー希望  
小売価格 **¥44,000** (税込)

本体価格 **¥40,000**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-200 | 00254-000389 |



グリップ緑2個付き

メーカー希望  
小売価格 **¥44,000** (税込)

本体価格 **¥40,000**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-210 | 00254-000390 |



滑り止め・グリップ白2個付き

メーカー希望  
小売価格 **¥44,550** (税込)

本体価格 **¥40,500**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-300 | 00254-000391 |



滑り止め・グリップ緑2個付き

メーカー希望  
小売価格 **¥44,550** (税込)

本体価格 **¥40,500**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-310 | 00254-000392 |



リングアーム(グリーン)付き

メーカー希望  
小売価格 **¥56,100** (税込)

本体価格 **¥51,000**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-800 | 00254-000393 |



リングアーム(ベージュ)付き

メーカー希望  
小売価格 **¥56,100** (税込)

本体価格 **¥51,000**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-810 | 00254-000394 |



グリップ・リングアーム(緑)付き

メーカー希望  
小売価格 **¥57,200** (税込)

本体価格 **¥52,000**

| 品 番        | TAISコード      |
|------------|--------------|
| MP2000-900 | 00254-000405 |

## ■ マスカット用オプション



滑り止め(10枚)

メーカー希望  
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

| 品 番 | MP80-10 |
|-----|---------|
|-----|---------|



リングアーム(グリーン)

メーカー希望  
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

| 品 番 | MPRA-100 |
|-----|----------|
|-----|----------|



グリップ(緑)(10個)

メーカー希望  
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

| 品 番 | BR-66G |
|-----|--------|
|-----|--------|



グリップ(白)(10個)

メーカー希望  
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

| 品 番 | BR-66W |
|-----|--------|
|-----|--------|



リングアーム(ベージュ)

メーカー希望  
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

| 品 番 | MPRA-110 |
|-----|----------|
|-----|----------|



使用例

# ベストセレクトバー（ユニット鋼板壁面用）

## ユニット鋼板壁面手すり

マグネット式固定工法 PAT

# 磁力

マグネットベース裏面  
(特殊接着シート付き)


### 鋼板パネル専用




施工責任取付製品

プリント鋼板パネル  
塩ビ鋼板パネル  
ホーローパネル

### 安全耐荷重

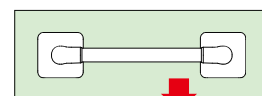


脱離強度 **100kgf**

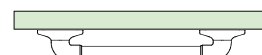


引張強度 **100kgf**

### 磁石がつく鋼板パネルに取り付け OK


マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。

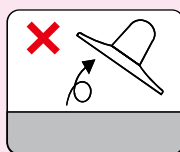


磁石がつかない壁面

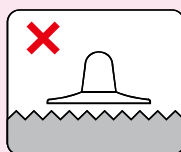







凹凸の大きな壁面

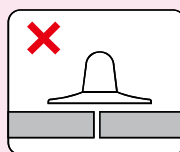

穴の開いている壁面

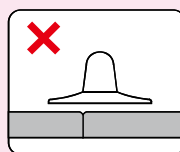

継目や段差のある壁面

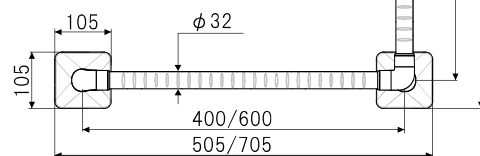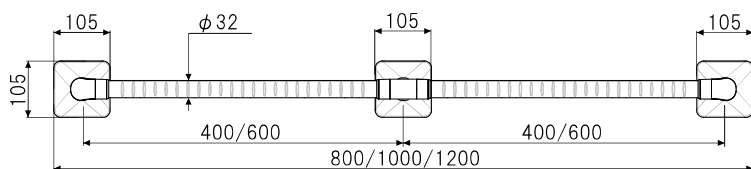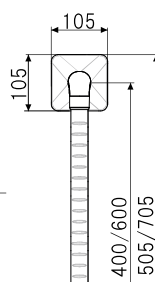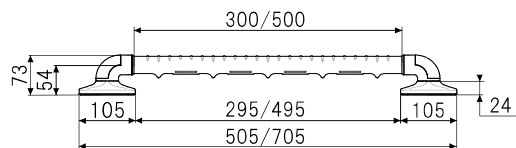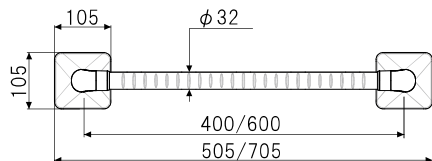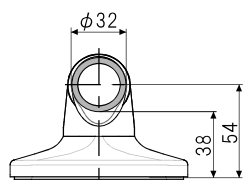

施工には混合ガンが必要です。



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| SB-310 | 混合ガン         |              |
| 価格     | ¥ 8,800 (税込) | ¥ 8,000 (税抜) |

| マグネット手すり | 品番        | サイズ     | 本体価格          |               |
|----------|-----------|---------|---------------|---------------|
| ストレート    | UM-400-10 | 400     | ¥ 20,900 (税込) | ¥ 19,000 (税抜) |
|          | UM-600-10 | 600     | ¥ 22,000 (税込) | ¥ 20,000 (税抜) |
| L 型      | UM-440-10 | 400×400 | ¥ 34,100 (税込) | ¥ 31,000 (税抜) |
|          | UM-460-10 | 600×400 | ¥ 35,200 (税込) | ¥ 32,000 (税抜) |
|          | UM-660-10 | 600×600 | ¥ 36,300 (税込) | ¥ 33,000 (税抜) |
| 連続型      | UM-404-10 | 400+400 | ¥ 34,100 (税込) | ¥ 31,000 (税抜) |
|          | UM-406-10 | 600+400 | ¥ 35,200 (税込) | ¥ 32,000 (税抜) |
|          | UM-606-10 | 600+600 | ¥ 36,300 (税込) | ¥ 33,000 (税抜) |

# ベストセレクトバー（タイル・樹脂壁面用）

## タイル・樹脂壁面手すり

圧着式固定工法 PAT



# 圧着

圧着ベース裏面


タイル壁面・パネル用




施工責任取付製品

タイル壁面  
タイルパネル  
樹脂パネル

安全耐荷重

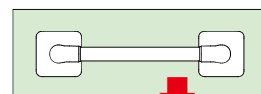

脱離強度 **100kgf**

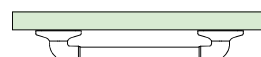


引張強度 **100kgf**

36 タイル(109 角108 角)へも現場対応可能

ベース部圧着機構により、特殊接着シートを確実に接着、  
タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。

100 角、150 角、200 角タイルの他、旧来の 36 タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターを現場で調整することで、ピッチを合わせることができます。600 用 (556mm 対応) 400 用 (444mm 対応)

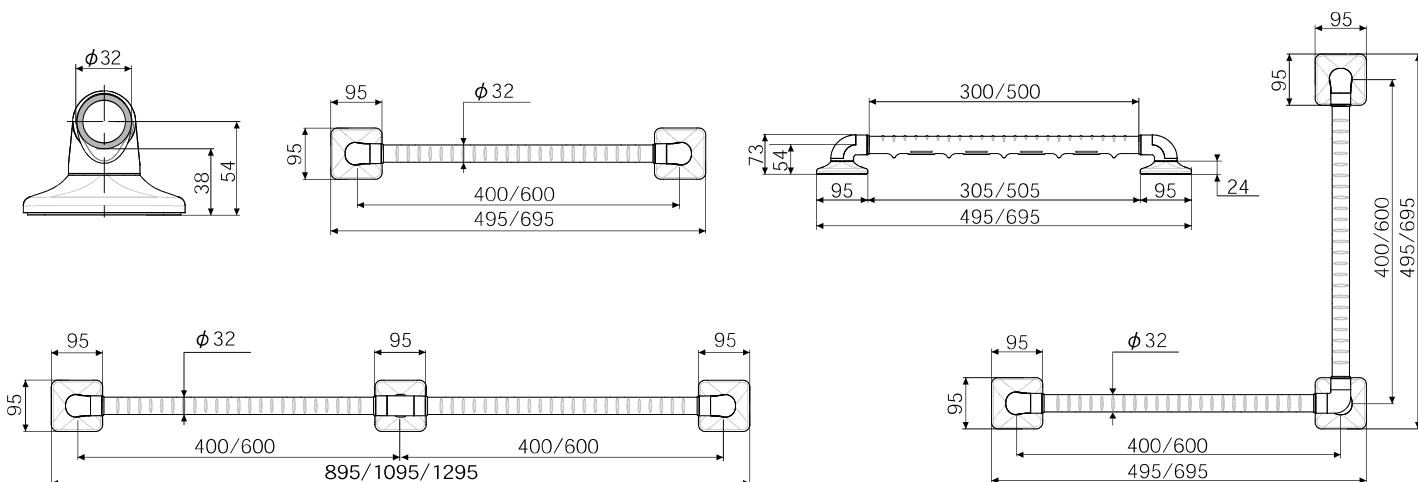

施工には混合ガンが必要です。



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| SB-310 | 混合ガン         |              |
| 価 格    | ¥ 8,800 (税込) | ¥ 8,000 (税抜) |

| 圧着手すり | 品 番       | サイズ     | 本体価格          |               |
|-------|-----------|---------|---------------|---------------|
| ストレート | UA-400-10 | 400     | ¥ 20,900 (税込) | ¥ 19,000 (税抜) |
|       | UA-600-10 | 600     | ¥ 22,000 (税込) | ¥ 20,000 (税抜) |
| L 型   | UA-440-10 | 400×400 | ¥ 34,100 (税込) | ¥ 31,000 (税抜) |
|       | UA-460-10 | 600×400 | ¥ 35,200 (税込) | ¥ 32,000 (税抜) |
|       | UA-660-10 | 600×600 | ¥ 36,300 (税込) | ¥ 33,000 (税抜) |
| 連続型   | UA-404-10 | 400+400 | ¥ 34,100 (税込) | ¥ 31,000 (税抜) |
|       | UA-406-10 | 600+400 | ¥ 35,200 (税込) | ¥ 32,000 (税抜) |
|       | UA-606-10 | 600+600 | ¥ 36,300 (税込) | ¥ 33,000 (税抜) |



# 強度試験データ

## 水平荷重試験


### BPZ 785.531N (80kgf) 荷重試験

#### ■ 試験条件

新型ベスポジの試作本体にテストショットの下部ベースを取り付け床から1000mmの高さを水平方向に引張り下部ベースのズレや変形破損がないか検証を行う。

- 1 : 水平荷重 784.531N(≒80kgf) ホールド 60秒
- 2 : 速度 50mm/min
- 3 : 天井高さ 2500mm
- 4 : オートグラフ AGS-5kNX( 島津製作所)


#### ■ 試験イメージ

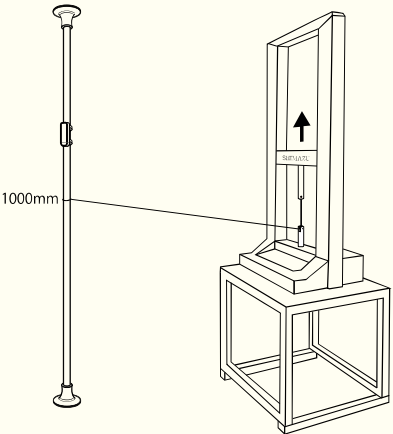

#### ■ 試験結果

ズレおよび破損・変形はなし。


- 1 : 793.45N
- 2 : 57.75mm  
(ワイヤーのたわみ取りとストロークリミッター分含む)

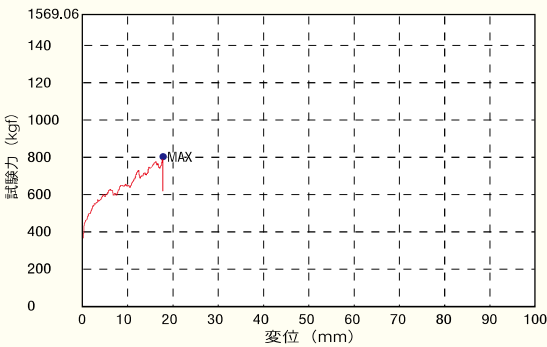

### 伸縮手すり 繰り返し荷重試験 (疲労試験)

ベスポジと伸縮手すりをH型に組み、900～1200サイズの伸縮手すりを最長である1200mmに設定し、試験機をまたぐ形で設置する。芯々1200mmの中央を試験機にて400N (40kgf) での繰り返し荷重を行う。(400Nは80kgの人が利用した際の想定荷重値) これを7年使用する想定25,550回を上回る、30,000回を目標に行う。検証は1,000回ごとに伸縮の動作確認を実施し、破損・変形がないことを確認する。10,000回ごとに、ブラケットを分解し、ブラケット樹脂に疲労劣化の兆候、破損・変形がないか確認する。

#### ■ 試験イメージ

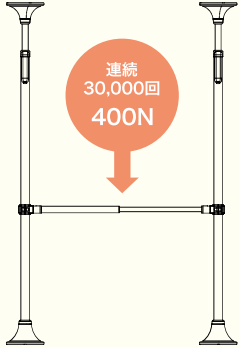

#### ■ 試験結果

| 荷重回数    | 破損・変形 | ブラケット内部状態確認   |
|---------|-------|---------------|
| 10,000回 | 無し    | 破損・変形・劣化の兆候無し |
| 20,000回 | 無し    | 破損・変形・劣化の兆候無し |
| 30,000回 | 無し    | 破損・変形・劣化の兆候無し |

# マスカット・ベストセレクトバー強度試験データ

## 強度試験

### マスカットポールタイプ 980.665N (≒100kgf) 荷重試験


マスカットポールタイプを用いてユニットバスに設置し、浴槽床から1000mmの位置から700mmの位置に下方向へ引っ張り、変形、破損の状態を計測する。

#### ■ 試験内容


JIS規格の静的水平荷重の試験に基づきながら、JISの400Nの目標値より高い980Nを弊社の目標値として、同様の静的水平荷重試験を行い、手すりの脱離や破損がないことを確認する。

(負荷は静的荷重を目標とすることから100mm/minの速度で荷重していく)

#### ■ 試験結果

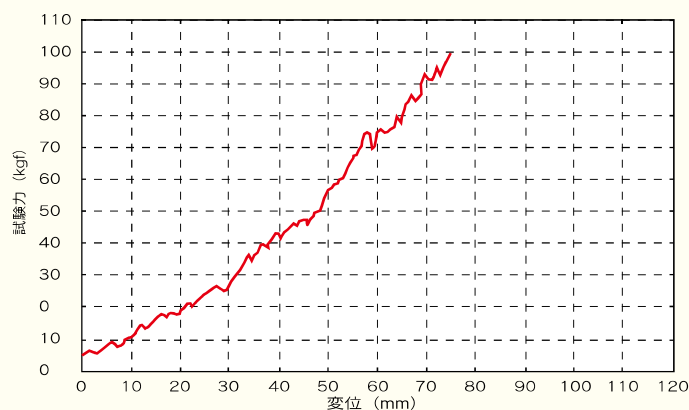

#### ■ 試験イメージ

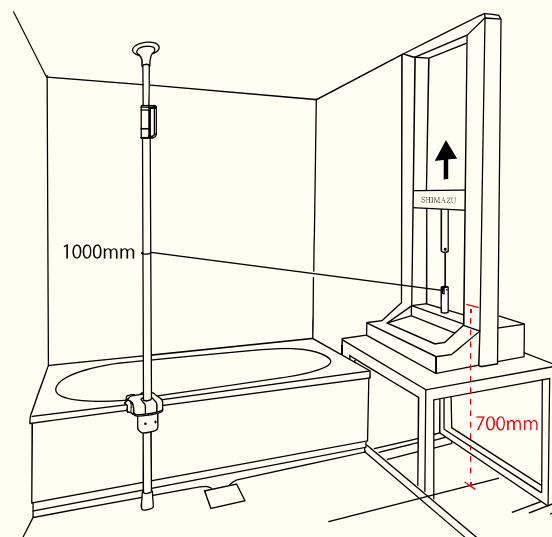


強度試験動画 QRcode

### セレクトバー荷重強度試験 (社内及び、公的機関で実施)

#### 荷重試験


##### ■ せん断試験

荷重後に試験体にどれだけの荷重が加わり、どのように変化したのかを検証する試験

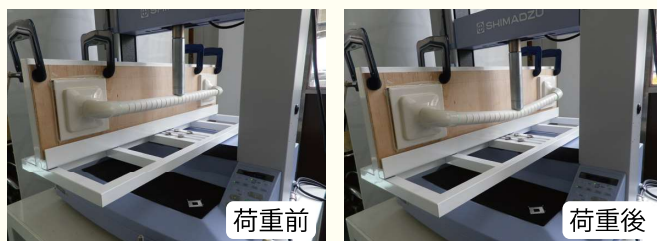

条件・・・被着壁面に固定した手すり中央部を一定速度で加圧  
手すりが破損、脱離するまでの荷重をもとめる  
結果・・・安全荷重内での変化はなく、一定して強度を確保

せん断試験グラフ  
試験機 : オートグラフ  
試験速度 : 10 mm/min

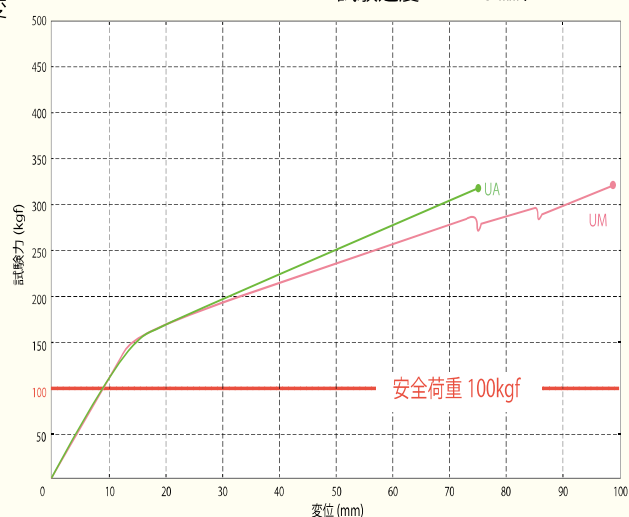





医療法人マックシール 異病院リハビリテーション特化型デイサービス (画像提供)

製品・施工関係問い合わせ  
DIPPER ホクメイ株式会社

ホームページ <http://www.dipper-hokumei.co.jp/>

|           |           |                       |                      |                  |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 本 社       | 〒110-0015 | 東京都台東区東上野 1-7-5       | TEL 03-5818-0621 (代) | FAX 03-5818-0624 |
| 大 阪 本 部   | 〒544-0001 | 大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1    | TEL 06-6754-0625 (代) | FAX 06-6758-6485 |
| 中 部 営 業 所 | 〒453-0013 | 愛知県名古屋市中村区亀島 2-26-4   | TEL 052-459-3004 (代) | FAX 052-453-1277 |
| 福 岡 営 業 所 | 〒812-0013 | 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-18-30 | TEL 092-686-9300 (代) | FAX 092-686-9260 |

■カタログの商品の仕様・価格は改良の為、予告なく変更する場合があります。■カタログの写真は印刷の為、多少実物とは色が異なります。